


IN-CHECK (インチェック)

英国
クレメントクラーク社製

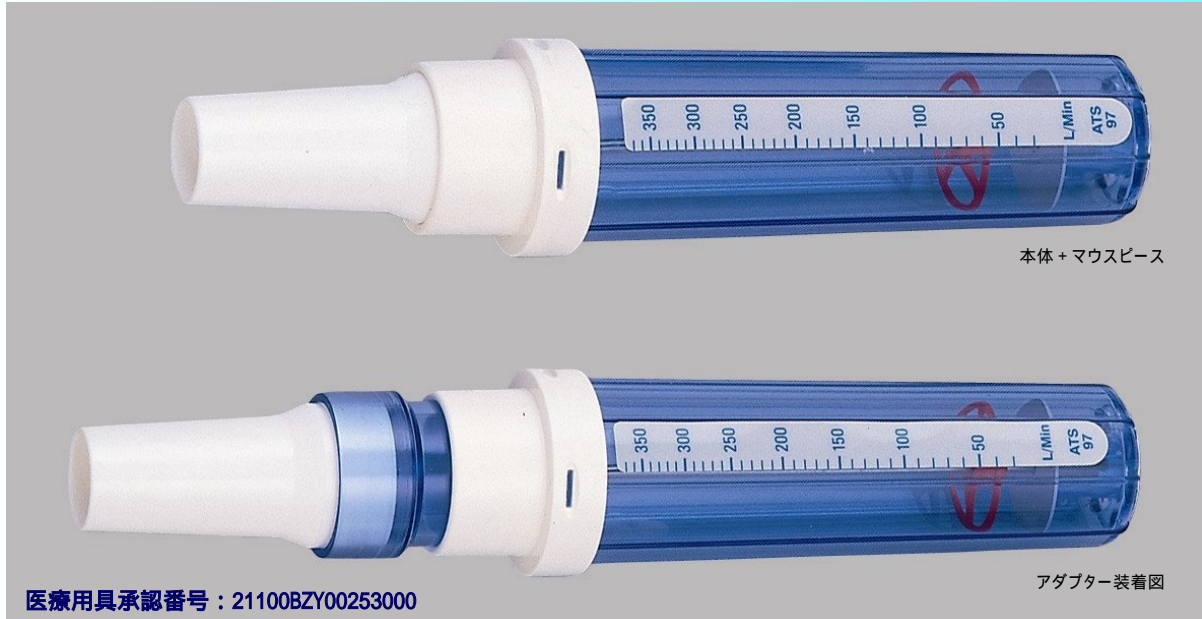

本体 + マウスピース

アダプター装着図

医療用具承認番号：21100BZY00253000

インチェックは簡単に気道の吸気流速が測定できる用具です
 ドライパウダー吸入器の患者の使用適格性が判断できます。(アダプター使用)
 患者自身がドライパウダー吸入時の最適吸入方法を会得できます。(アダプター使用)
 患者の吸気流速のモニターが簡単に行なえます。

<リセット方法>

- ・インチェックを使用する前に必ずリセットを行って下さい。
- ・マウスピースが上にくるように垂直に持ち底を手のひらでインチェックが垂直の状態にたたく。
- ・内部の上端に固着された磁石が下に落ちてポインターをもとの位置に戻します。
- ・ポインターが元の位置に戻った時点でインチェックを180度ひっくり返すと磁石が元の上端に戻り固着され、リセット完了。
- ・注意：インチェックをしばらく使用していない後に、再度使用する際リセットする作業で磁石が上記のようにたたいてもなかなか下に落ちないことがあります。その場合は、机の上にやわらかいタオル等を敷いてその上に強くたたきつけて下さい。

<測定方法>

- ・十分に息を吐き出します。
- ・本体を水平に持ち、マウスピースを唇でぴったりとふさぐようにくわえる。
- ・いきいきに息を吸います。
- ・ポインターの止まった目盛り(吸気流速)を読みます。

<お手入れ方法> 中性洗剤液で洗浄して下さい。

	薬液消毒	煮沸消毒	オートクレーブ
マウスピース			
本体		×	×
アダプター		×	×

<別売品>

はクレメントクラーク社
ミニライトピークフローメーター
にもご使用頂けます。




商品名	規格品番	本体価格
アダプター(ディスクヘラー用:D4)	00210806	¥400(税込¥420)
アダプター(ディスクス用:A/A/D)	00037528	¥400(税込¥420)
アダプター(タービュヘラー用:T)	00037527	¥400(税込¥420)
アダプター(スピリーバハンディヘラー用:HH)	00210809	¥600(税込¥630)
アダプター(クリックヘラー用:C)	00210813	¥1,800(税込¥1,890)
プラスチック製マウスピース	00210700	¥250(税込¥263)
紙製ディスクマウスピース(20個×5箱入)	00210702	¥2,000(税込¥2,100)

<アダプター>

	タイプ	DPI種類
	D4	ディスクヘラー (グラクソミスクライン社)
	A/A/D	ディスクス (グラクソミスクライン社)
	T	タービュヘラー (アストラゼネカ社)
	HH	スピリーバハンディヘラー (ペーリンガーインゲルハイム社)
	C	クリックヘラー (大塚製薬)

●本体とマウスピースの間に装着して使用します

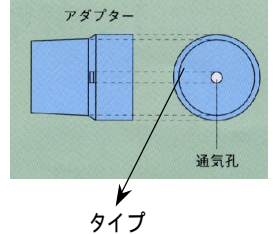

- ・DPIの種類に合わせて適合するアダプターを本体にセットしてご使用下さい。
- ・各アダプターは各種DPIの抵抗値に合わせて通気孔の孔径が異なります。
- ・各アダプターの通気孔はインチェック本体に取り付けた時のセット全体の抵抗値をもとに設計されています。
- ・各アダプター内側にタイプが表示されておりますので、ご使用の際に必ずご確認下さい。
- ・アダプター単品ではご使用頂けません。

商品名	インチェック (本体+マウスピース)		
本体価格	7,000円 (税込7,350円)		
規格品番	210800	カタログコード	01-2161-00
サイズ	44 × 160mm (約90g)		
測定範囲	30 ~ 370L/min		
精度	±10%以内 又は、10L/min		

医療機器分類：管理医療機器 (特定保守該当)

<お問い合わせ先>

松吉医科器械株式会社 輸入品担当
 〒103-8444 東京都中央区日本橋本町4-6-6
 TEL 03-3279-4724 FAX 03-3279-2428