


機械器具 43 医療用つち
一般医療機器 つち JMDNコード:11947010

ナイロンハンマー

【 禁忌・禁止 】

本製品を改造、曲げ、打刻（刻印）、切削等の二次加工をすることは、折損、事故等の原因となりますので絶対に行わないで下さい。

【 形状、構造及び原理等 】

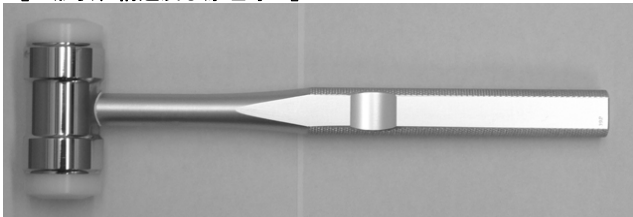

＜ 組成及び寸法 ＞

(1) ナイロンハンマー軽 (アルミ製)

柄	アルミニウム	アルマイト仕上げ
頭	アルミニウム	アルマイト仕上げ
打込部	ポリアセタール樹脂	

全長 mm	重量 g	頭部外径 mm
230	225	30

(2) ナイロンハンマー重 (真鍮製)

柄	アルミニウム	アルマイト仕上げ
頭	真鍮	クロムメッキ仕上げ
打込部	ポリアセタール樹脂	

全長 mm	重量 g	頭部外径 mm
232	375	30

【 使用目的、効能又は効果 】

ハンドル、軸及びヘッドからなる金属製(通常ステンレス製)の器具をいう。ハンドルは手のひらに適合するように設計されており、通常丸い。このハンドルは軸に向かって先細になっており、この軸の先端にヘッドがある。ハンマーヘッドは、通常、円柱形であるが、様々な形状のものもある。衝撃を吸収するために片端又は両端をゴム又はプラスチック等の物質に取り付けるハンマーヘッドもある。

【 操作方法又は使用方法等 】

**＜使用方法＞

柄部分を持ち、目的物に頭部分を当て、打ち込みを行う。

**＜使用方法に関する使用上の注意＞

- (1) 消毒の必要があるときは本製品をアルコール清拭消毒後、使用してください。
- (2) 使用目的（診療・手術等の医療行為）以外の目的で使用しないで下さい。
- (3) 頭部の平面以外で打ち込みを行わないでください。

【 使用上の注意 】

**＜重要な使用上の注意＞

- (1) 使用後は必ず洗浄し十分に乾燥させてください。そのままにしておくと、腐蝕、錆等の原因となります。
- (2) 使用後は必ず破損の有無を確認し、万一、破損部が体内に脱落した恐れのあるときは直ちに除去してください。
- (3) 使用時に、必要以上の力でたたかないで下さい。柄部の破断、樹脂部の破損等の恐れがあります。
- (4) 頭部の平面以外(特に柄部)で叩いた場合は本製品の柄部等に損傷を与えている可能性がありますので使用を中止して下さい。
- (5) 打込部は交換可能とするため、頭部へねじ込みのみしてあり、接着してありません。打ち込みによる衝撃や熱を加えることにより次第に緩んできますので、使用前に必ず緩みがないか確認し、緩みがある場合は締め直して下さい。
- (6) 打込部が欠ける等した場合は新しい打込部に交換して下さい。

【 貯蔵方法及び使用期限等 】

- (1) 温度及び湿度の高い場所での貯蔵を避けて下さい。
- (2) 使用後は腐蝕防止のため、必ず洗浄、乾燥して下さい。

**【 保守・点検に係る事項 】

- (1) 使用前後には必ず汚れ、傷、変形等の異常がないか確認してください。
- (2) オートクレーブ滅菌は打込部の溶解や柄部と頭部を固定している接着剤に影響を与えるため行わないで下さい。
- (3) ステラット滅菌は打込部を脆弱化させますので行わないで下さい。
- (4) アルカリ、酸性洗剤、消毒剤等は本器を腐蝕させる恐れがありますので使用しないで下さい。
- (5) 金属たわし、クレンザー等は器具の表面を傷める恐れがありますので使用しないでください。

【 包装 】

1 個

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者の名称：株式会社大和製作所
住所：〒382-0005 長野県須坂市大字小河原2243番地
電話：026-245-1576
製造業者の名称：株式会社大和製作所