

機械器具 46 医療用絞断器
管理医療機器 単回使用デルマトーム用刃 35134000

フェザースキングラフトナイフブレード

再使用禁止

【警告】

非常に鋭利な刃物であるため、取り扱いに注意すること。

【禁忌・禁止】


- 本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。
- 再使用禁止。

【形状、構造及び原理等】

形状:


エッシュマンタイプ

L 157mm × W 18mm × T 0.229mm

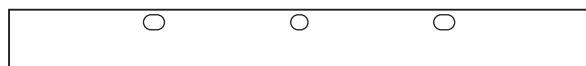


ゴールドデュプレックスタイプ

L 78.3mm × W 18.4mm × T 0.254mm

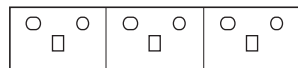

シンプレックスタイプ

L 52.2mm × W 18.4mm × T 0.254mm

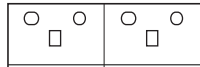

組成:ステンレス鋼

原理:本品は、スキングラフトナイフ(デルマトーム)に取り付け、火傷(やけど)等の採皮・植皮に用いる切刃である。

【使用目的、効能又は効果】

各種サイズの切り刃で、デルマトームに取り付けて皮膚移植組織の採取に用いる刃をいう。本品は単回使用である。

【品目仕様】

刃: 滑らかな仕上げ面をもち、使用上有害な腐食、バリがなく、又、刃先は精密に形成され、先端部にはキズ及びフェザードエッジ(まくれ刃)の無いことを確認した製品です。

刃の材料: 均一で微細結晶粒組織をもつ、炭素含有率0.2%以上のクロムステンレス鋼から加工し、ビッカース硬さで500以上に焼き入れされた、材料を使用しています。

安全性: JIS T0993-1に従い生物学的安全性を確認した製品です。

【操作方法、使用方法等】

包装を開封し取り出し、スキングラフトナイフに装着してご使用下さい。ご使用のスキングラフトナイフ(デルマトーム)に適切なサイズの刃を取り付けてください。

※鋭利な刃物です、刃先には十分ご注意ください。

【使用上の注意】

- 本品は、【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- 本品は、医療有資格者以外は使用しないこと。
- 包装が破損している場合、包装が開封されている場合又は、製品に破損などの異常が認められる場合は使用しないこと。
- 本品は、滅菌済みである為、包装を開封したら直ぐに使用すること。
- 使用後は、感染防止に配慮して安全な方法で廃棄すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 高温・多湿、直射日光及び水濡れを避けて室温で保管する。
- 使用期限は製造日より5年。
販売単位箱及び個別包装に表示

例. 0000-00 → 使用期限0000年00月を示す。

- 製造年月日はロットナンバーにより明示。

LOT 00 00 0000

製造年西暦下2桁 製造月 製造バッチ

【包装】

個別包装(1枚入):アルミ複合材

販売単位箱(100枚入):ボール紙(表面ビニール塗布加工)

【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称及び住所等】

<製造販売元>フェザー安全剃刀株式会社 美濃工場

岐阜県美濃市松森600-1 TEL.0575-33-1855

<製造元>フェザー安全剃刀株式会社 本社

大阪府大阪市北区大淀南3-3-70 TEL.06-6458-1631

<お問い合わせ先>フェザー安全剃刀株式会社 東京支店

メディカル商品部 TEL.03-3864-0917