

機械器具 34 医療用刀
管理医療機器 単回使用メス 35130002

フェザーディスポーザブルスカルペル <ミニ>

再使用禁止

【警告】

非常に鋭利な刃物であるため、取り扱いに注意すること。

【禁忌・禁止】

- 本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。
- 再使用禁止。


【形状・構造及び原理等】

形状と品番

No.11M



No.14M

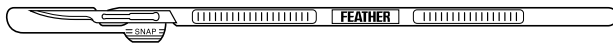

No.15M



組成:刃部/ステンレス鋼

柄部/ABS樹脂

原理: 本品は、上記に示す形状の刃先を持つ外科手術用のメスである。使用するには、刃先カバーを折り、「外科手術に使用すること及び、切離並びに検査、研究用試料及び物体の切断に使用すること。」を目的とし、術者が刃形状及び刃先を有用に利用し、手術に使用する単回使用メスである。

【使用目的、効能又は効果】

外科手術に使用すること及び切離並びに検査、研究用試料及び物体の切断に使用すること。


【品目仕様】

- 刃: 滑らかな仕上げ面をもち、使用上有害な腐食、バリがなく、又、刃先は精密に形成され、先端部にはキズ及びフェザードエッジ(まくれ刃)の無いことを確認した製品です。
- 刃の材料: 均一で微細結晶粒組織をもつ、炭素含有率0.2%以上のクロムステンレス鋼から加工し、ピッカース硬さで500以上に焼き入れされた、材料を使用しています。
- 安全性: 発熱性及び毒性のない事を確認した製品です。


【操作方法、使用方法等】

刃先のカバーを折り、外科手術の一般的な切開に使用する。

1. 包装を開封して取り出す。

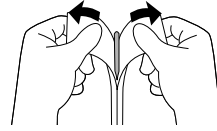

2. "SNAP"部分を折り、刃先カバーを外す。

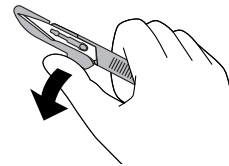

※鋭利な刃物です、刃先には十分ご注意ください。

【使用上の注意】

- 本品は、【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- 本品は、医療有資格者以外は使用しないこと。
- 包装が破損している場合、包装が開封されている場合又は、製品に破損などの異常が認められる場合は使用しないこと。
- 本品は、滅菌済みである為、包装を開封したら直ぐに使用すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 高温・多湿、直射日光及び水濡れを避けて室温で保管すること。
- 包装材料を傷つけたり、ピンホールを生じさせないように取り扱うこと。
- 使用期限は製造日より5年。
販売単位箱及び個包装に表示。

例. ○○○○-○○ → 使用期限○○○○年○○月を示す。

- 製造年月日はロットナンバーにより明示。

LOT 00 00 0000

製造年西暦下2桁 製造月 製造バッチ

【包装】

個別包装(1本入):アルミ箔複合材
販売単位箱(20本入):ボール紙(表面ビニール塗布加工)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

<製造販売元>フェザー安全剃刀株式会社 美濃工場

岐阜県美濃市松森600-1 TEL.0575-33-1855

<製造元>フェザー安全剃刀株式会社 本社

大阪府大阪市北区大淀南3-3-70 TEL.06-6458-1631

<お問い合わせ先>フェザー安全剃刀株式会社 東京支店

メディカル商品部 TEL.03-3864-0917