

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 洗浄器キット 11297001

販売名: 洗浄嘴管

C タイプ

【警告】

〈使用方法〉

・清拭・消毒をしないと感染の原因になることがあるので
器具の洗浄・消毒を十分行うこと。


【禁忌・禁止】

〈使用方法〉

・本品は手動式生体用洗浄器・大腸灌流装置に用いるための
パッケージ品であり、使用目的以外は使用しないこと。
〔誤動作や故障の原因となる。〕

【形状・構造及び原理等】

● Cタイプ

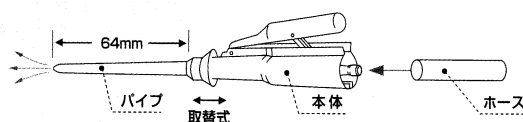

※ Cタイプは先端のパイプ部分のみを取り替えます。

- ・材質 ポリエチレン・シリコン
- ・本体寸法 全長168mm 先端径 9φ
- ・最大吐出量 1L/分

手動式生体用洗浄器・大腸灌流装置と洗浄嘴管の接続口をシリコンホース
(もしくは塩ビ系ホース)で接続し、落差式にて流れてきた液体(薬液)など
を、洗浄嘴管のアーム部を握ることにより液体(薬液)の流量を開閉するこ
とが可能。噴射方向は左記図水の出口方向に噴出することが可能。先端
のパイプ部分は取り外しが可能。

【使用目的又は効果】

本品は、手動式生体用洗浄器・大腸灌流装置と組合せて、容器から流
出する洗浄液を処置部位に衛生洗浄、治療、又は排便後の洗浄、痔、
生理時の各洗浄や宿便、便秘などの温水洗腸などに使用することを目
的とした、パッケージ品である。

【使用方法等】

1. 本品は非滅菌品である。使用前に十分洗浄・消毒を行い使用すること。
2. 洗浄嘴管先端部分に傷、バリ、変形がないことを確認すること。
3. 本品と同時に使用する電気保温洗浄器(手動式生体用洗浄器・大腸灌
流装置)の取扱説明書に従って、ホース、5L 容器と接続すること。
4. 電気保温洗浄器(手動式生体用洗浄器・大腸灌流装置)の取扱説明書
に従って処置部位へ、衛生洗浄、治療、又は温水洗腸に使用して
ください。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 本品は非滅菌品であり、菌の発生を防ぐ為
使用前・使用後は必ず清拭・消毒を行うこと。
・ガス滅菌を行う場合は 65℃以下で使用するこ
・オートクレーブは不可。
・ベンジンやキシロールなどで清拭禁止
2. 接続口にホースを接続するときは、本体とアーム部分
を握り接続口に接続すること。
〔握らず接続すると中の O リングが外れる場合がある。〕
3. 故障した場合は、勝手にいじらず「故障中」などの
適切な表示を行い、修理は専門家に任せること。
4. 本品は消耗品として扱い、劣化や変色した場合は
速やかに交換すること。
5. 先端のパイプ部分を接続するときは、水分を拭きとって接
続してください。水分があるままで接続すると外れやすくな
ります。

【保管方法及び有効期間等】

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

有限会社 ダイヤモンド電気

住所 : 東京都新宿区高田馬場 4-32-6

電話 : 03-5331-3351 FAX03-5331-5330

製造業者

有限会社 ダイヤモンド電気

住所 : 東京都新宿区高田馬場 4-32-6

取扱説明書を必ずご参照下さい。