

機械器具 34 医療用刀
管理医療機器 単回使用メス用刀 37445000

フェザー耳鼻咽喉用替刃メス

【警告】


- 非常に鋭利な刃物であるため、取り扱いに注意すること。

【禁忌・禁止】

- 本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。
- 刃先に過度な力が加わる手術には使用しないこと。
- 専用ハンドル以外のハンドルへの取り付け禁止。
- 再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

主な刃部形状

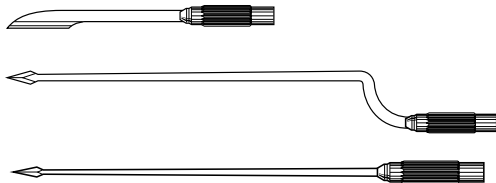

組成:刃部/ステンレス鋼
その他構成部/真鍮

原理: 本品は、様々な形状の刃先を持つ外科手術用のメスである。
上記に示す様なブレードを専用ハンドルに取り付け、ブレードの刃部形状および刃先を術者が有用に利用し、手術に使用する単回使用メスである。

【使用目的、効能又は効果】

外科的手術に使用すること及び、切離並びに検査・研究用試料及び物体の切断に使用すること。

【品目仕様】

- 刃: 滑らかな仕上げ面をもち、使用上有害な腐食、バリがなく、又、刃先は精密に形成され、先端部にはキズ及びフェザーエッジ(まくれ刃)の無いことを確認した製品です。
- 刃の材料: 均一で微細結晶粒組織をもつ、炭素含有率0.2%以上のクロムステンレス鋼から加工し、ピッカース硬さで500以上に焼き入れされた、材料を使用しています。
- 安全性: 発熱性及び毒性のない事を確認した製品です。

【操作方法、使用方法等】

専用ハンドルに替刃を取り付け、外科的手術に使用する。


主に微細な部分の手術に使用する。

(専用ハンドル)

フェザー微細手術用替刃メスハンドル各種 MF-100, NF-150S等


〈ハンドル装着方法〉

1.

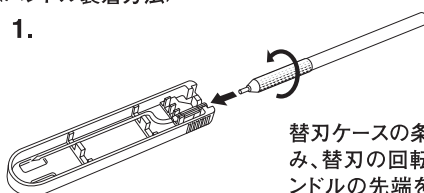

替刃ケースの条線部分を強くはさみ、替刃の回転を防ぎながら、ハンドルの先端を替刃の尾部にねじ込む。


2.

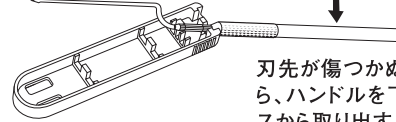

刃先が傷つかぬよう注意しながら、ハンドルを下げ替刃ケースから取り出す。

※廃棄の際は、この逆の手順でケースに収納し廃棄することを推奨します。

3.

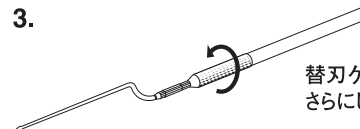

替刃ケースから取り出した後、さらにしっかりとネジを締める。

※鋭利な刃物です、刃先には十分ご注意ください。

※フェザー微細手術用替刃メスハンドルの添付文書【操作方法・使用方法】の項をご参照ください。

【使用上の注意】

- 本品は、【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- 本品は、医療有資格者以外は使用しないこと。
- 包装が破損している場合、包装が開封されている場合又は、製品に破損などの異常が認められる場合は使用しないこと。
- 本品は滅菌済みである為、包装を開封したら直ぐに使用すること。
- 使用後は、ハンドルより取り外し感染防止に配慮して安全な方法で廃棄すること。(ケースに収納して廃棄する事を推奨します。)

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 高温・多湿、直射日光及び水濡れを避けて室温で保管すること。
- 使用期限は製造日より5年
販売単位箱に表示

例: 0000-00 → 使用期限 0000年00月を示す。

- 製造年月日はロットナンバーにより明示。

LOT 00 00 0000

製造年西暦下2桁 製造月 製造バッチ

【包装】

個別包装(1本入): ケース / 耐熱プラスチック
台紙 / ポリエチレン樹脂(不織布)
ブリスター / PET樹脂

販売単位箱(5本入): ボール紙(表面ビニール塗布加工)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

〈製造販売元〉フェザー安全剃刀株式会社 美濃工場

岐阜県美濃市松森600-1 TEL.0575-33-1855

〈製造元〉フェザー安全剃刀株式会社 本社

大阪府大阪市北区大淀南3-3-70 TEL.06-6458-1631

〈お問い合わせ先〉フェザー安全剃刀株式会社 東京支店

メディカル商品部 TEL.03-3864-0917