

機械器具 34 医療用刀
管理医療機器 単回使用眼科用ナイフ 32764002

フェザー眼科カミソリ

再使用禁止

【警告】

- 非常に鋭利な刃物であるため、取り扱いに注意すること。
[切傷、穿刺等のおそれがある。]

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止。[感染症を引き起こすおそれがある。]
- 本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状



組成:カーボン鋼

原理:本品は、レーザーホルダーで刃を挟み折ることでブレードとして使用する。術者が折った刃先形状及び刃先を有用に利用し、目及びその周辺部位切開などの手術に使用するための単回使用眼科用ナイフ(ブレード)である。

【使用目的又は効果】


眼科手術に使用すること。

【使用方法等】


包装を開封して替刃を取り出し、レーザーホルダーに取り付けて使用してください。

<開封方法>


1. アルミ箔(表・裏)をそれぞれ指で掴む。

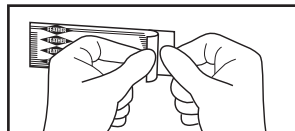


2. ゆっくりと引っ張り、最後まで開封する。

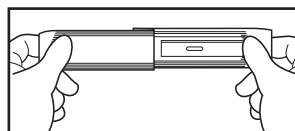


3. アルミ箔の裏側から、刃先に触れない様に替刃の刃元側を押す、剥がす。

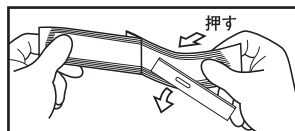

4. アルミ箔から清潔野へ静かに落とす。

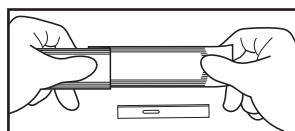

<レーザーホルダーへの装着方法>

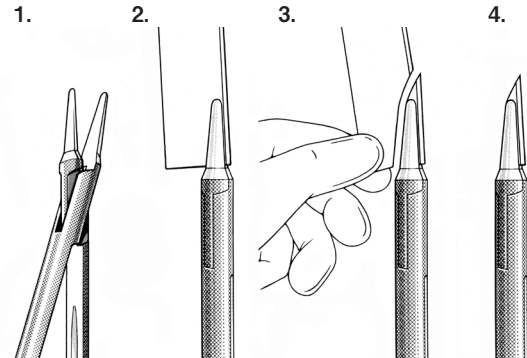

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 軟骨・骨などの硬組織には使用しないこと。
[刃先が破損するおそれがある。]
- 他の医療機器と一緒に個別包装のまま再滅菌をする場合はくお問い合わせ先>に確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温・多湿、直射日光及び水濡れを避けて室温で保管すること。
- 使用期限は製造日より5年。(自己認証による)

例. ○○○○-○○は使用期限○○○○年○○月を示す。

- 製造年月日はロットナンバーにより明示。

LOT 00 00 0000

製造年西暦下2桁 製造月 製造バッチ

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売元>フェザー安全剃刀株式会社 美濃工場
岐阜県美濃市松森600-1 TEL.0575-33-1855

<製造元>フェザー安全剃刀株式会社 本社
大阪府大阪市北区大淀南3-3-70 TEL.06-6458-1631

<お問い合わせ先>フェザー安全剃刀株式会社 東京支店
メディカル商品部 TEL.03-3864-0917