

機械器具 34 医療用刀
管理医療機器 単回使用メス 35130002

フェザーセーフシールドスカルペル

再使用禁止

【警告】


非常に鋭利な刃物であるため、取り扱いに注意すること。

【禁忌・禁止】


- 本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。
- 再使用禁止。

【形状、構造及び原理等】

形状

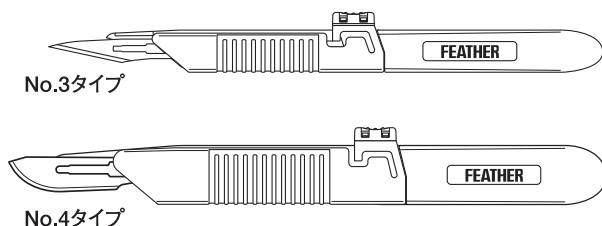

主な刃部形状と品番

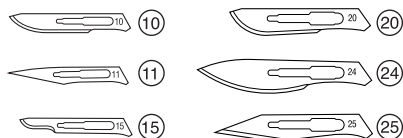

組成: 刃部/ステンレス鋼

柄部/ABS樹脂

安全カバー/ABS樹脂

原理: 本品は、様々な形状の刃先を持つ外科手術用のメスである。
ハンドル部に取り付けてある安全カバーにより刃先を保護し使用時の安全性を高める。使用者が形状を有用に利用し、手術に使用する単回使用メスである。

【使用目的、効能又は効果】

外科的手術に使用すること及び切離並びに検査、研究用試料及び物体の切断に使用すること。


【品目仕様】

- 刃: 滑らかな仕上げ面をもち、使用上有害な腐食、バリがなく、又、刃先は精密に形成され、先端部にはキズ及びフェザーエッジ(まくれ刃)の無いことを確認した製品です。
- 刃の材料: 均一で微細結晶粒組織をもつ、炭素含有率0.2%以上のクロムステンレス鋼から加工し、ビッカース硬さで500以上に焼き入れされた、材料を使用しています。
- 安全性: 発熱性及び毒性のない事を確認した製品です。


【操作方法又は使用方法等】

外科的手術の一般的な切開に使用する。


1. 包装を開封して取り出す。

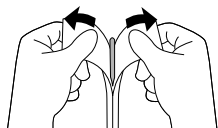

2. 使用時はプッシュボタン前部を押しながら、手前にスライドさせて下さい。

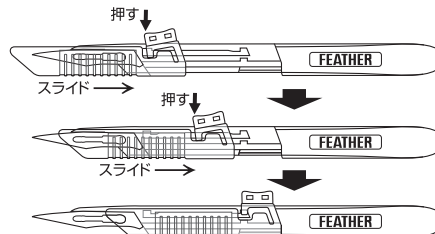

3. 使用後は、プッシュボタン前部を押しながら安全カバーを前にスライドさせ、刃先を覆い、廃棄処分して下さい。

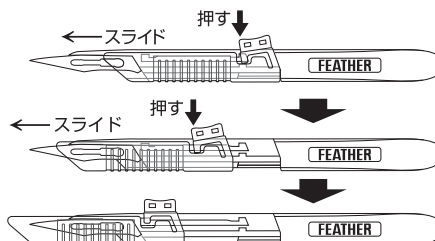

※鋭利な刃物です、刃先には十分ご注意ください。

※柄部のスケールは目安程度にご使用ください。

【使用上の注意】

- 本品は、【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- 本品は、医療有資格者以外は使用しないこと。
- 包装が破損している場合、包装が開封されている場合又は、製品に破損などの異常が認められる場合は使用しないこと。
- 本品は、滅菌済みである為、包装を開封したら直ぐに使用すること。
- 使用後は、感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 高温・多湿、直射日光及び水濡れを避けて室温で保管すること。
- 包装材料を傷つけたり、ピンホールを生じさせないように取り扱うこと。
- 使用期限は製造日より5年。
販売単位箱及び個包装に表示

例. 0000-00 ➡ 使用期限 0000年00月を示す。

- 製造年月日はロットナンバーにより明示。

LOT 00 00 0000

製造年西暦下2桁 製造月 製造バッチ

【包装】

個別包装 (1本入): 台紙/ポリエチレン樹脂(不織布)
フィルム/ポリエチレン樹脂、PET樹脂
販売単位箱 (20本入): ボール紙(表面ビニール塗布加工)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

<製造販売元> フェザー安全剃刀株式会社 美濃工場
岐阜県美濃市松森600-1 TEL.0575-33-1855
<製造元> フェザー安全剃刀株式会社 本社
大阪府大阪市北区大淀南3-3-70 TEL.06-6458-1631
<お問い合わせ先> フェザー安全剃刀株式会社 東京支店
メディカル商品部 TEL.03-3864-0917