

機械器具 34 医療用刀
管理医療機器 単回使用メス用刀 37445000

フェザー替刃メス

再使用禁止

【警告】


- 非常に鋭利な刃物であるため、取り扱いに注意すること。
[切傷、穿刺等のおそれがある。]

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止。[感染症を引き起こすおそれがある。]
- 本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

主な形状と品番

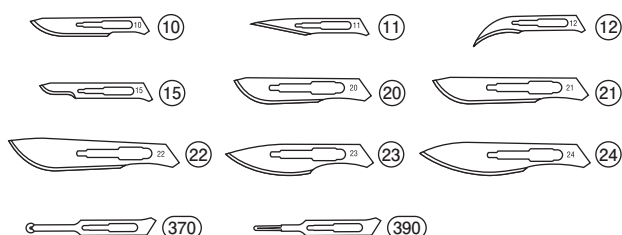

組成: ステンレス鋼

原理: 本品は、専用ハンドルに取り付けて外科手術に使用する単回使用のメス用刀(ブレード)である。

【使用目的又は効果】


外科手術に使用すること及び切離並びに検査、研究用試料及び物体の切断に使用すること。

【使用方法等】


包装を開封して替刃を取り出し、専用ハンドルに取り付けて使用してください。

<開封方法>


1. アルミ箔(表・裏)をそれぞれ指で掴む。

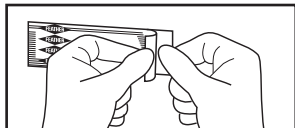


2. ゆっくりと引っ張り、最後まで開封する。

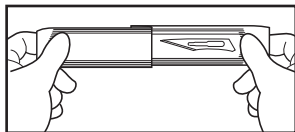


3. アルミ箔の裏側から、刃先に触れない様に替刃の刃元側を押し、剥がす。(替刃の刃元側を掴んでも可)

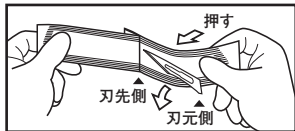


4. アルミ箔から清潔野へ静かに落とす。

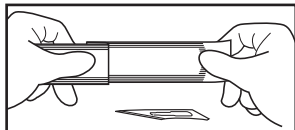

<替刃の装着方法>

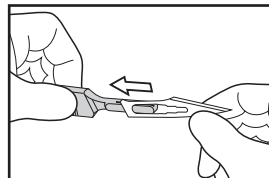


1. 替刃のガイド穴をハンドル先端の溝に合わせる。

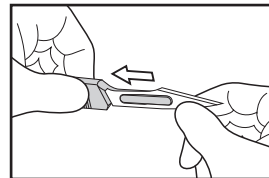


2. 替刃の刃先を手前に反らし、そのままカチッというまで押し込む。

<替刃の取り外し方法>

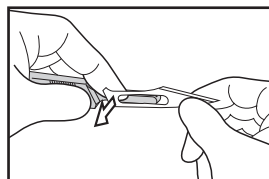

1. 左手指で替刃の後部を手前に押し上げ、ハンドル先端より浮かす。

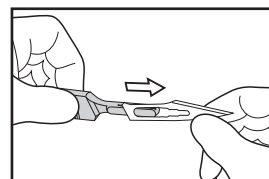

2. 替刃のガイド穴がハンドルから浮いた状態で替刃をゆっくりと引き出す。

<専用ハンドル> フェザー替刃メスハンドル

製造販売届出番号: 21B2X10001062003

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- 専用ハンドル以外のハンドルへ取り付けけないこと。
[ブレードが取り付けできない場合や固定できないおそれがある。]

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 軟骨・骨などの硬組織には使用しないこと。
[刃先が破損するおそれがある。]
- 他の医療機器と一緒に個別包装のまま再滅菌をする場合はくお問い合わせ先>に確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温・多湿、直射日光及び水濡れを避けて室温で保管すること。
- 使用期限は製造日より5年。(自己認証による)
- 例. ○○○○-○○ は使用期限○○○○年○○月を示す。
- 製造年月日はロットナンバーにより明示。

LOT 00 00 0000

製造年西暦下2桁 製造月 製造バッチ

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売元> フェザー安全剃刀株式会社 美濃工場
岐阜県美濃市松森600-1 TEL.0575-33-1855

<製造元> フェザー安全剃刀株式会社 本社
大阪府大阪市北区大淀南3-3-70 TEL.06-6458-1631

<お問い合わせ先> フェザー安全剃刀株式会社 東京支店
メディカル商品部 TEL.03-3864-0917