


【形状・構造等】 * 右図参照

- ・ミラー本体: 92φ × 107mm (ブラケットを含む)
材質: アルミ JIS A-1070P
ミラーブラケット: リベット止め
- ・ミラー: 90φ
鏡面: 300R アルミ蒸着
- ・観察孔: 12.4φ
- ・ミラーカバー: 92.5φ × 3.6 板厚0.3mm
材質: アルミ JIS A-1070P
- ・ヘッドバンド: 巾21mm
材質: ABS樹脂 + PVC
調節可能範囲: 直径112~200mm
バンドブラケット: リベット止め
- ・アジャスター: 各ブラケットの先端を挟み蝶ネジで固定する
- ・重量: 100g

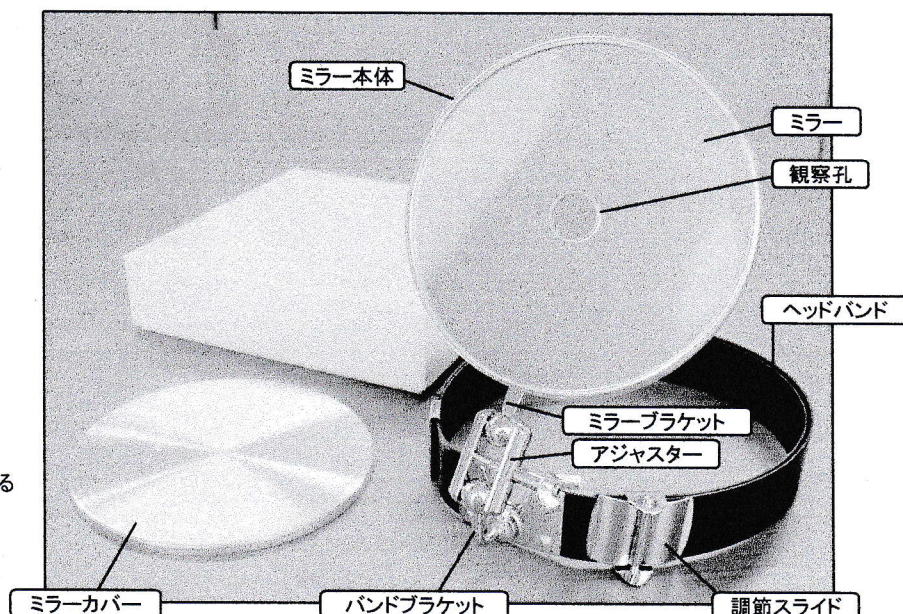

【性能・使用目的】

1. 性能


: 焦点距離 300mm

2. 使用目的


凹面鏡の反射光による口腔内、鼻腔内および内耳の観察・診断

【使用方法】

1. ヘッドバンドを調節し頭部に装着する。
(調節方法は右図を参照してください)
2. ミラーを眼前にもってくる。
3. 観察孔をのぞき診断部位を観察する。

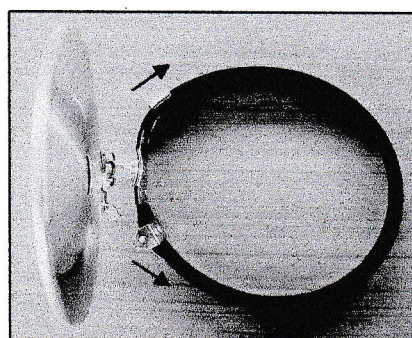

調節スライドを矢印の方へ移動させる

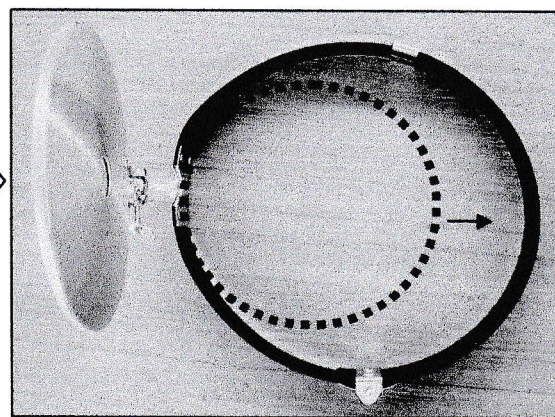

【使用上の注意】

1. 診断に支障のないよう確実に装着してください。
2. 鏡ですので落としたり、ぶつけたりしないでください。

【取り扱い上の注意】

1. 本器は上記に記述した目的以外の使用はしないでください。
2. 乱暴な取扱いはしないでください。

【保守・点検等】

1. 保管は高温・多湿・直射日光を避け、常温で適切な管理をしてください。
2. 本器は繰り返し使用される医療用具です。観察孔は常に清潔な状態を保ち、鏡面の汚れは乾布で拭き取るなど、衛生上および安全上の適切な管理をお願いします。
3. 部品交換の際は、当社純正部品をお使いください。
4. 本製品の耐用年数は3年です。(自己認証)

【製造販売業者】

田中産業株式会社 東京都荒川区荒川 6-26-5
TEL: 03-3892-4481 FAX: 03-3892-4450

【アフターサービス等の問合せ先】

田中産業株式会社 東京都文京区本郷 3-16-3
TEL: 03-3814-7181 FAX: 03-3814-7177