

器50 開創又は開孔用器具
一般医療機器 硬性直達肛門鏡 10156001

肛 門 鏡

筒型肛門鏡（黒川タイプⅠ）

(AT-KA001 AT-KA002 AT-KA003 AT-KA004 AT-KA007)

【禁忌・禁止】

本製品を曲げ、切削、打刻(刻印)等の二次的加工(改造)することは、故障、汚損等の原因となりますので、絶対に行わないで下さい。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

AT-KA001 (Lサイズ) 先端径20mm 有効長90mm
AT-KA004 (LMサイズ) 先端径18mm 有効長80mm
AT-KA002 (Mサイズ) 先端径17mm 有効長75mm
AT-KA007 (MSサイズ) 先端径15mm 有効長73mm
AT-KA003 (Sサイズ) 先端径12mm 有効長70mm

2. 原材料

黄銅にクロムメッキ

【使用目的・効能又は効果】

一般外来肛門検査・治療、病室での肛門検査・治療、人間ドック
肛門検査、集検用肛門検査

【操作方法、使用方法等】

1. 本品は未滅菌のため、エチレンオキシドガス滅菌又は高圧蒸気滅菌を施した上で使用する。

A. エチレンオキシドガス滅菌標準条件

使用ガス	酸化エチレン	20%
	炭酸ガス	80%
圧力	1.0±0.2kg/cm ²	
温度	60±5℃	
湿度	70±10%RH	
時間	4時間以上	
エアレーション	20分間の排気及び2時間の無菌チャージを行う。	

B. 高圧蒸気滅菌標準条件

温度	121℃
圧力	1.0kg/cm ²
時間	20分間

2. 肛門鏡本体にマンドリンを装着し、キセノンライト付肛門鏡グリップ（別売）にセットする。
3. 肛門に対して、マンドリン先端より挿入を開始し、挿入し終わった後、マンドリンを抜去する。
4. 肛門鏡グリップのライトをつけ診断部の状態をみる。
5. 使用後、肛門鏡本体及びマンドリンを水洗して付着物を十分に落とし、グルタールアルデヒド又は逆性石けん液にて消毒後、清潔な場所に保管し、再使用に備えるものとする。（再使用時は上記1.→4.の順序に従うものとする。）

※ キセノンライト付肛門鏡グリップ（別売）につきましては薬液をガーゼ等に浸し、汚れを拭き取って下さい。水又は薬液に直接浸けますと故障の原因となりますのでおやめ下さい。

【使用上の注意】

1. 使用目的以外の目的で使用しないで下さい。また、使用時に必要以上の力（応力）を加えると、故障、曲がり、汚損等の原因となりますので御注意下さい。
2. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄・消毒して下さい。

【貯蔵・保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法

貯蔵・保管にあたっては、洗浄・消毒をした後、腐食を防ぐために保管期間の長短に関わらず必ず乾燥をして下さい。

2. 使用耐用年数

保管環境、使用頻度によって使用期限は異なるため使用者の判断による。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、職業感染防止のために消毒をして下さい。
2. 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用して下さい。
3. 洗剤の残留がないよう十分にすすぎをして下さい。仕上げすぎには、浄化水（濾過、蒸留、脱イオン化等）を用いることをお奨めします。
4. 洗浄後は、腐食防止の為に、直ちに乾燥して下さい。
5. 使用前に、汚れ、傷、曲がり等に異常がないか点検して下さい。

【包装】

1本入り

【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元

株式会社荒川製作所
〒120-0013
東京都足立区弘道1-3-26
TEL 03-5888-6855
FAX 03-5888-6880

製造元

株式会社荒川製作所
東京都足立区弘道1-3-26

