

類 別：機械器具 53 医療用消息子
一 般 的 名 称：手術用消息子（JMDNコード：32870001）
ク ラ ス 分 類：一般医療機器（クラスⅠ）

販売名：子宮サグリ

【警告】

- ・本品は医師等の適切な訓練を受けた医療従事者以外には使用しないこと。
- ・本品を下記の【使用目的、効能又は効果】に示す使用目的以外には使用しないこと。

【禁忌・禁止】

- ・本品は使用目的以外に使用しないこと。
- ・本品の加工、改造等は絶対に行わないこと。
- ・本品の使用に当たってはこの添付文書を熟読し、その内容を事前に十分理解すること。
- ・本品を切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）することは折損等の原因になるので、絶対に行わないこと。



【原材料】先端部：純銀製（純度：99.99%以上）
中間部：銅
柄部：真鍮、ニッケルクロームメッキ

【使用目的・効能又は効果】

金属製又は軟性材料製で細かい棒状の手術器具をいう。洞、瘻、その他の空洞又は創部を探查するために用いる。プローブ先端は、特定の解剖学的用途（乳様突起の探查等）に合わせて設計されており、シャフトに対して直角に湾曲するものもある。本品は再使用可能である。

【品目仕様等】

目視により観察したとき、本体各部に形状の異常、曲がり、表面のバリ、傷、異物の付着・被覆を認めないこと。

【操作方法又は使用方法】

1. 使用前に、本品が適切に洗浄又は滅菌されていることを確認する。
2. 本品に変形や表面の傷、異物の付着等がなく、本品の体内挿入部表面が清潔かつ滑らかであることを確認する。
3. 通常の婦人科的手技により、本品を使用する。
4. 本品の使用後は、すみやかに血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・滅菌を行う。

【使用上の注意】

1. 使用前に、必ず洗浄・滅菌をすること（保守・点検に係る事項参照）。
2. 使用前に変形や傷が無いか、器具が正常に作動することを確認の上、使用すること。
3. 本品の使用目的以外に使用しないこと。また、破損・曲がり等の原因となり得るので、使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。
4. 本品の使用に際しては、常に患者の状態を注意深く観察し、少しでも異常を感知した場合は、直ちに使用を中止して、その原因を究明すること。

5. 使用後は、付着している血液・体液・組織及び薬品が乾燥しないよう、ただちに洗浄液等に浸漬すること。
6. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因となるので、できるだけ使用を避けること。使用中にこれらの消毒剤が付着したときには、水洗いすること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

【貯蔵・保管方法】

1. 常温・常湿にて保管すること。
2. 貯蔵・保管にあたっては、洗浄した後、腐食を防ぐため、保管期間の長短にかかわらず、必ず乾燥させること。
3. 滅菌済みのものを貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管するとともに、有効保管期間の管理をすること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はすみやかに血液・体液・組織等の汚物を除去し、職業感染防止のため洗浄・消毒すること。
2. 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適した医療用洗剤を用い、適正な濃度で使用する。
3. 洗浄装置（超音波洗浄装置・ウォッシャー・ディスインフェクタ等）で洗浄する場合は、破損防止のため、長時間の洗浄や器具同士の接触を避けること。
4. 洗剤の残留がないように十分すすぎをすること。仕上げすすぎには、浄化水（濾過、蒸留、脱イオン化等）を用いることを推奨する。
5. 洗浄後は、腐食防止のため、直ちに乾燥させること。
6. 強アルカリや強酸性洗剤／消毒剤は、本品を腐食させるおそれがあるので使用を避けること。金属たわし・クレンザー（磨き粉）等は、本品の表面を損傷するので、汚物除去及び洗浄には使用しないこと。
7. 使用前の点検で異常があった場合には使用しないこと。
8. 本製品は本品の製造販売業者が認めた場合以外、修理しないこと。
9. 絶対に改造・改修はしないこと。

【推奨滅菌方法：高圧蒸気滅菌（温度：126℃、時間：15分以上）】

【包装単位】

1本／袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元／製造元
三祐医科工業株式会社
〒121-0052
東京都足立区六木1丁目12番9号
TEL：03(3605)7842／FAX：03(3628)7411