

機械器具 (24) 知覚検査又は運動機能検査用器具 コード:37529000

*一般医療機器 一般的名称 角度計

*角度計

【警告】

【使用方法】

本製品は未滅菌品である。必ず適切な方法で消毒してから使用すること。(【保守・点検に係る事項】の項参照)

【禁忌・禁止】

【使用方法】

- ① 本製品を曲げ、切削、打刻(刻印)等の二次的加工(改造)することは、折損等の原因となるので絶対に行わないでください。

*【形状・構造及び原理等】

本品は、主に以下のような基本形状があります。包装されている製品の製品名・カタログ番号及びサイズ・基本形状については、直接被包に記載されている。

1. 形状：基本形状は分度器に長さの違ったパー付と分度器自体の3連がある医療器具です。
スタンダードタイプ



3 連タイプ



2. 原材料：ステンレス鋼
3. 原理：角度を測定できるように分度器が装着されています。

*【使用目的、効能又は効果】

本製品は、骨の角度を測定するために使用する医療機器です。

*【操作方法又は使用方法等】

本品は未滅菌の状態では供給される。

*【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 使用前に必ず洗浄(保守・点検に係る事項参照)すること。
- 2) 使用目的(手術・処置等の医療行為)以外の目的で使用しないこと。また、折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の(応力)を加えないこと。

2. 不具合・有害事象

長時間生理食塩水や血液にさらさないで下さい。又次の化学薬液は腐食や孔食を起しますので注意してください。
塩化アンモニウム・塩化バリウム・塩化カルシウム・塩化第

一鉄・塩化水銀・塩化第一スズ・チオシアン酸カリウム・過マンガン酸カリウム・次亜塩素酸ナトリウム・石灰酸・デキリン液・塩素化石灰・王水・ヨウ素・フェノール 等

*【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 1) 貯蔵・保管にあたっては、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥すること。

*【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項

- 1) 使用後は、血液、体液、組織等の汚物が付着した場合はできるだけ早く除去し、職業感染防止のために洗浄・消毒すること。
- 2) 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥すること。
- 3) 使用(滅菌)前に、汚れ、傷、曲がり、歯の損傷、可動部の動き等に異常がないか点検をすること。
- 4) 強アルカリ/強磁性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させるおそれがあるので、使用をさけること。
- 5) 本品の滅菌には下記の方法を推奨する。
エチレンオキサイドガス滅菌の場合
温度：50～60℃
湿度：60～100%
エチレンオキサイドガス濃度：580～730mg/L
暴露時間：4 時間
エアレーション：12 時間

*【包装】

1 本/袋

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

日本フリッツメディコ株式会社
〒270-0163 千葉県流山市南流山 6 丁目 9 番地 3 号
TEL: 04-7158-5155 FAX: 04-7158-5157
<http://www.frigzmj.com>

(外国製造所の氏名又は名称及び国名)

DR・FRIGZ INTERNATIONAL (PVT) LTD.

ドクター・フリッツ インターナショナル社
パキスタン