

医療用品3 手術用手袋及び指サック
管理医療機器 非天然ゴム製手術用手袋 JMDNコード40549000

エンブレム手術用手袋ラテックスフリー


「再使用禁止」

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】

本品は、非天然ゴム製のパウダなしの滅菌済み手術用手袋です。

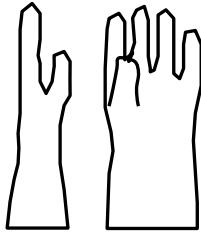

* 形状:C(曲指型)
表面仕上げ:T(全面が粗面)

(単位 mm)

呼び番号	掌部の幅	最小全長	厚さ
5	67±4	250	0.13 以上
5.5	72±4		
6	77±5	260	
6.5	83±5		
7	89±5	270	
7.5	95±5		
8	102±6		
8.5	108±6	280	

**【使用目的】

医科及び歯科で手術に用いる場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する滅菌済みの使い捨て形式の手袋です。

**【使用方法等】

1. 包装を開封し、台紙ごと手袋を取り出す。
2. 台紙の折り返し部分をつまんで開き、手袋を取り出し装着する。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- 体質・使用状況により、かゆみ・かぶれ等の遅延性のアレルギー症状（Ⅳ型：主に加硫促進剤等の添加剤の化学物質による）を引き起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を施してください。

2. 重要な基本的注意

- 1 双袋包装を開封したらすぐに使用してください。
 - 1 双袋包装が破損していたり、汚損していた場合には、使用しないでください。
 - 刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがありますのでご注意ください。
 - **●使用後は感染防止に留意し、安全な方法で処分してください。
- ##### 3. 相互作用
- この包装が開封されるか又ははきず付けられるまで無菌です。
 - 手袋は、薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透する場合がありますので確認の上使用してください。
 - 電気メス使用時に高周波回路が形成された場合、手袋の電気的絶縁性が損なわれ、火傷を起こすことがありますので注意してください。

**【保管方法及び使用期間等】

**1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、紫外線、オゾン、高温や湿気を避けて保管してください。

**2. 使用期限

滅菌後3年として使用期限を表示。（自己認証により設定）

【包装】

20双/箱

**【主要文献及び文献請求先】（添付文書請求先）

三興化学工業株式会社 品質保証課
TEL (0827) 52-3111 FAX (0827) 53-7622

**【製造販売業者及び製造業者の名称等】

**製造販売業者

名称：三興化学工業株式会社
住所：広島県大竹市新町2丁目11番4号
連絡先：TEL (0827) 52-3111 FAX (0827) 53-7622

**外国製造業者

名称：サンケムコーポレーション
SANCHEM CORPORATION SDN BERHAD
国名：マレーシア