

2011年3月10日作成(第1版)

製造販売届出番号：13B3X00169000001

機械器具(76)医療用吸入器
耳鼻咽喉科用ネブライザ：70451000
一般医療機器

ネブライザー


【禁忌・禁止】

1. キズ・ヒビ割れ・破損がある場合は使用禁止


【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造


(1)ネブライザーセット

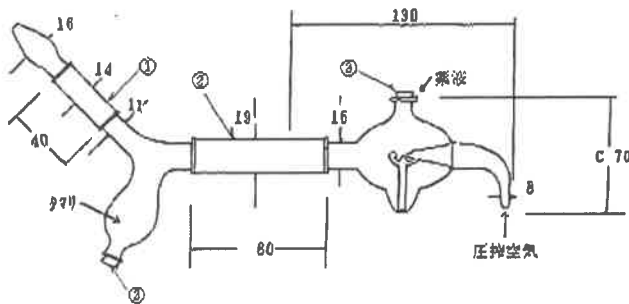

(2)L型

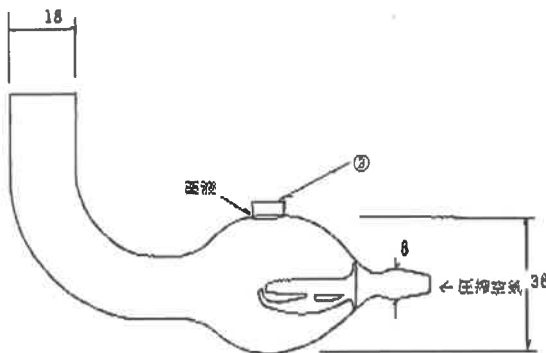

(3)ワニ型

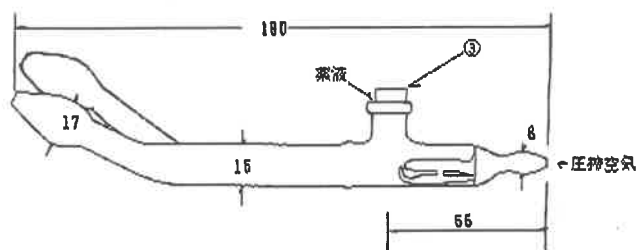

単位：mm

2. 組成・材料

ガラス・シリコンゴム(①・②)・天然ゴム(③)

3. 作動・動作原理

本品は一旦容器内に貯留した薬液又は水を、霧吹きの原理により霧化し、この発生した霧を吸入療法に利用するための圧搾空気作動式のネブライザーであり、施設の圧縮空気に接続して使用する。

本品は、未滅菌品である。(再使用可能)

【使用目的】

薬液又は水の霧化並びに放散

【操作方法又は使用方法等(用法・用量を含む)】

1. 本品を取り出し、コンプレッサーに送気管を用いて接続する。
2. ゴム栓を外して、薬液又は水を注入する。
3. 圧搾空気をネブライザー内へ送気する。
4. 霧化状態が良好であることを目視で確認後使用する。

【使用上の注意】

1. 水又は薬液の注入は必ず所定の場所(ゴム栓を外して)より行うこと。
2. 使用における水又は薬液の液面は床面に対して水平状態であること。
3. 衝撃等には注意すること。
4. 使用後は速やかに適正な方法において洗浄・消毒すること。

【貯蔵・保管方法及び試用期間等】

保管は衝撃の加わらない場所であること。

【包装】

1 個包装箱に収納

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

株式会社 樹水

東京都文京区本郷2丁目25番2号

TEL 03-3813-9466 FAX 03-3814-1136