

医 04 整形用品
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

メディカルドレープ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

不織布及び不織布 - ポリエチレンフィルムの貼り合せ品サイズ
(60cm×60cm、200cm×300cm 等) 及び穴ずれ防止の粘着テー
プ貼り合せによって種類は異なる。

【使用目的又は効果】

手術時に手術部周辺を覆う不織布製品で手術部を清潔に保つ為に
使用される。

【使用方法等】

本品はディスポーザブル製品であり、再使用はできない。

- 1) 滅菌包装に破れ等の損傷又は水濡れがないことを確認する。
- 2) 滅菌包装を開封し、無菌的に取り出す。
- 3) 消毒した手術部周辺を覆う。

【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ず滅菌包装に破れ等の損傷又は水濡れがないこと
を確認する。
- 2) 損傷や水濡れがあれば使用しないこと。
- 3) 欠陥を発見した折には使用しないこと。
- 4) 包装開封後は直ちに使用し、使用後は感染防止に留意し、安
全な方法で廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

1) 保管方法

- ・直射日光、水ぬれ、高温・多湿の環境を避けて保管すること。
- ・傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）等を避けて安定した状態で
保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管するこ
と。

2) 有効期間

- ・包装に表示している使用期限欄を参照のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売元〉

株式会社メディテックジャパン

問い合わせ先：Tel06-7711-6060

[発売元]

イワツキ株式会社

東京都板橋区志村 1 丁目 32 番 18 号

問い合わせ先：Tel03-3966-8371