

医05 副木  
一般医療機器 成形副木 35354000

## ドルフハード

### 【形状、構造及び原理等】

本品は、本体にナイロンメッシュまたはポリエチレン板を使用した頸椎固定用シーネである。2枚のパーツから成り、適用部のサイズに応じて高さが調節できるものもある。  
頸部を固定することにより頸椎損傷部への負担を軽減する。

### 【使用目的又は効果】

損傷した頸椎を固定(保護、安静保持)するために用いる。

### 【使用方法等】

※上下を確認し、本体の凹んでいる部分に顎をあてる。

[1号]

- ・肌側/外側を確認する。  
(商品タグの付いている面を外側にする)
- ・首に巻き、首の後ろで面ファスナーを留める。

[2号、3号]

- ・2枚のパーツを面ファスナーで接着し高さを調節する。
- ・肌側/外側を確認する。  
(商品タグ(シールタイプ)の付いている面を外側にする)
- ・首に巻き、首の後ろで面ファスナーを留める。

### 【使用上の注意】

- ・ご使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。
- ・頸椎固定以外の用途には、使用しないでください。
- ・本品は頸椎の保護、安静保持を目的としていますが、ご使用状況やご使用者の健康状態によって必ずしも完全に保護できるわけではありません。
- ・ご使用中に異常を感じた場合は、使用を中断し医師に相談してください。
- ・ご使用の際は、面ファスナーが直接肌にあたらないように装着してください。
- ・面ファスナーを着衣に引っかけないようにご注意ください。
- ・洗濯はしないでください。汚れた場合は硬くしぼったタオル等で拭き取ってください。

### 【保管方法及び有効期間等】

直射日光、水濡れ及び火気を避け、高温・多湿でない清潔な場所に保管すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 竹虎  
神奈川県横浜市瀬谷区卸本町 9279-69

\*製造業者 TAKETORA PHILIPPINES, INC. (フィリピン)

発売元 株式会社 竹虎

商品に関するお問合せ先 0120-094-315