

アトム臍帯クランプ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1) 再使用禁止、再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 各部の名称

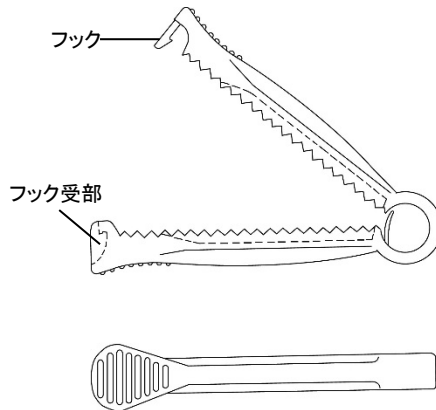

2. 体に接触する部分の組成

ポリアセタール

【使用目的又は効果】

臍帯閉鎖術用クリップの定義から逸脱しない使用目的、効能又は効果

【使用方法等】

- 1) 臍輪から約 2cm の部位の臍帯をクランプの中央に合わせる。
- 2) クランプの先端をカチッと音がするまで押して確実に結紮する。
- 3) クランプから胎盤側に約 1cm 離れた部位を臍帯剪刀で切断する。
- 4) 臍帯が確実に結紮されていることを確認し、常に児の状態を監視する。特に結紮・切断の約 30 分～1 時間後には臍帯から出血のないことを確認する。
- 5) クランプは、結紮後 24 時間以上経ってから、解除子を使って取り外す。解除子をフック受部に差し込み、下図に示す矢印方向に押すとロックが解除される。

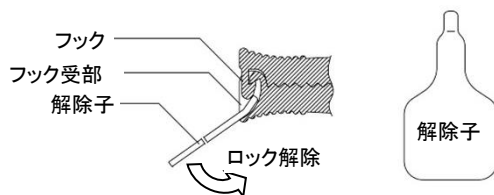


図. クランプのロック解除方法

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 1) 臍帯は臍帯クランプの中央で結紮すること。
- 2) 包装開封後はすぐに使用すること。
- *3) 結紮・切断の約 30 分から 1 時間後には、臍帯から出血がないことを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

水ぬれに注意し、高温多湿、直射日光を避けて保管する。

＜有効期間＞

使用期限は外箱に記載 [自己認証データによる]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

■製造販売業者

アトムメディカル株式会社

〒338-0835 埼玉県さいたま市桜区道場 2-2-1

TEL: 048-853-3661(大代表) FAX:048-853-0304(代表)