

医療機器 51 医療用嘴管及び体液誘導管

一般医療機器 喉頭・気管用麻酔薬噴霧キット (JMDN コード: 70251000)

ファインアトマイザー (オーラル)

再使用禁止

【禁忌・禁止】


- 再使用禁止
- 本品のシリンジを IV 用として使用する事を禁止する。
[未滅菌のため]

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品の構造を以下に示す。

- (1) シリンジ (外筒)
- (2) プランジャ (押し子)
- (3) アトマイザー
 - (3-1) ルアーアダプタ
 - (3-2) ダブルルーメンチューブ
 - (3-3) ノズル

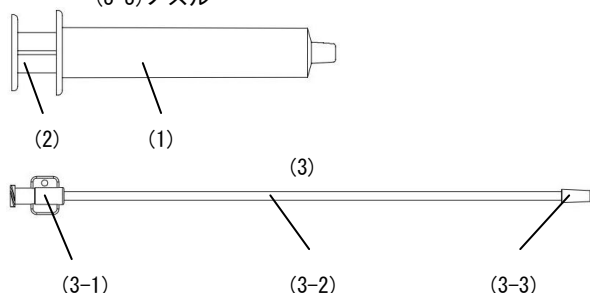

2. 原理

シリンジに注入した麻酔薬等を、アトマイザーを接続することで霧状に放出する。

【使用目的、効能又は効果】

本品は麻酔薬を局所に噴霧するために用いる器具であり、プラスチック製で、目盛付のシリンジ、及び着脱可能なアトマイザーから成る。

【一般的名称の定義】

咽頭、気管等への麻酔薬噴霧キットを言う。麻酔薬を吸い上げるために用いる針、注射筒、麻酔薬を噴霧するために複数の孔を持ったカニューレから成る。麻酔薬をシリンジで吸引し、シリンジから針を外し、カニューレを装着する。このカニューレを気管の中に適当な深さまで挿入する。プランジャを押すことによって、麻酔薬をカニューレの孔を通して咽頭、気管、気管分岐部に噴射する。

【操作方法又は使用方法等】

1. 必要に応じて、あらかじめ手袋を着用する。
2. 本品を包装から取り出す。
3. シリンジに麻酔薬を吸引する。
4. アトマイザーをシリンジに接続する。
5. 局所にアトマイザーの噴霧孔を向け、噴霧する。

<使用方法に関する使用上の注意>

- ・ アトマイザーがシリンジにしっかりと接続されていること

を確認すること。

- ・ アトマイザーを接続する際、接続部分 (ルアーアダプタ) に液体等が付着した場合は、液体等を拭取った後に接続すること。
- ・ 接続部からの液漏れ等の異常が認められた場合は使用を直ちに中止すること。
- ・ 麻酔薬を注入する際は、アトマイザーを外すこと。
- ・ ノズルから、正常に噴霧されるか、確認すること。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・ 包装が破損、汚染している場合や製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- ・ 使用するにあたっては目的とする製品であることを確認すること。
- ・ 包装を開封したらずに使用し使用後は感染防止に留意し安全な方法で処分すること。
- ・ 併用する医療機器の添付文書を確認後、それぞれの使用方法、使用上の注意に従って使用すること。
- ・ 使用中は破損、接続部の緩み及び液漏れ等について確認すること。
- ・ シリンジの目盛を超えてプランジャを引かないこと。
- ・ 使用中は本品の破損、接続部の緩み及び薬液の漏れ等について、定期的に確認すること。
- ・ 接液部を汚染させないこと。
- ・ 本品を滅菌等して再使用しないこと。
- ・ 併用する医薬品の添付文書を確認後、使用すること。
- ・ シリンジ印刷部を擦らないこと。また、印刷部に薬液がついた状態で放置しないこと。(目盛が消えるおそれがある)
- ・ 本品使用後は、医療廃棄物として処理すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵、使用方法
高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
2. 使用期限
使用期限は外箱に記載。

【包装】

25 個入/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称及び住所等】

<製造販売元及び製造元>

吉川化成株式会社 本社

住所: 大阪市鶴見区横堤 5 丁目 6 番 3 4 号

吉川化成株式会社 静岡工場

住所: 静岡県袋井市豊沢 8 0 6 - 1 番

<お問い合わせ先 (販売元)>

株式会社フジメディカル

住所: 東京都新宿区大京町 2 5 番地

新宿菅井ビル 8 F

電話番号: 03-3356-8377