

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 洗浄器キット 11297001

販売名: 洗浄嘴管

A タイプ, B タイプ

【警告】

〈使用方法〉


- ・清拭・消毒をしないと感染の原因になることがあるので器具の洗浄・消毒を十分行うこと。

【禁忌・禁止】

〈使用方法〉

- ・本品は手動式生体用洗浄器に用いるためのパッケージ品であり、使用目的以外は使用しないこと。
〔誤動作や故障の原因となる。〕

【形状・構造及び原理等】

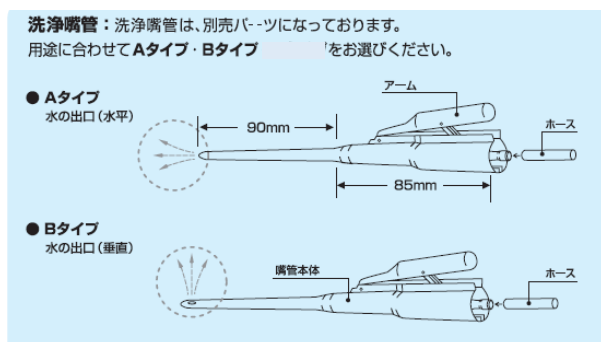

- ・材質 ポリエチレン
- ・本体寸法 全長175mm 先端径 8.5φ
- ・最大吐出量 1L/分

手動式生体用洗浄器と本品をシリコンホースもしくは塩ビ系ホースで接続し、落差式にて流れてきた洗浄液を、本品のアーム部を握ることにより液体(薬液)の流量を開閉することが可能。目的部位に噴出することができる。噴射方向はAタイプBタイプ(左記図水の出口)方向に噴出することができる。

【使用目的又は効果】

本品は、手動式生体用洗浄器と組合せて、容器から流出する洗浄液を処置部位に衛生洗浄、又は治療に使用することを目的としたパッケージ品である。

【使用方法等】

1. 使用前は十分洗浄・消毒を行い使用すること。
2. 洗浄嘴管先端部分に傷、バリ、変形がないことを確認すること。
3. 本品と同時に使用する電気保温洗浄器の取扱説明書に従って、ホース、5L 容器と接続すること。
4. 電気保温洗浄器の取扱説明書的使用方法に従って、衛生洗浄、又は治療に使用すること。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

1. 本品は非滅菌品であり、菌の発生を防ぐ為使用前・使用後は必ず清拭・消毒を行うこと。
 - ・ガス滅菌を行う場合は 65℃以下で使用する。
 - ・オートクレーブは不可。
 - ・ベンジンやキシロールなどで清拭禁止
2. 接続口にホースを接続するときは、本体とアーム部分を握り接続口に接続すること。
〔握らず接続すると中の O リングが外れる場合がある。〕
3. 故障した場合は、勝手にいじらず「故障中」などの適切な表示を行い、修理は専門家に任せること。
4. 本品は消耗品として扱い、劣化や変色した場合は速やかに交換すること。

【保管方法及び有効期間等】

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

有限会社 ダイヤモンド電気

住所 : 東京都新宿区高田馬場 4-32-6

グレイスハウス 3 階

電話 : 03-5331-3351 FAX03-5331-5330

製造業者

有限会社 ダイヤモンド電気

住所 : 東京都新宿区高田馬場 4-32-6

グレイスハウス 3 階

取扱説明書を必ずご参照下さい。