

一般的名称: 洗浄器キット

販売名: 洗浄嘴管

A タイプ, B タイプ, C タイプ

【警告】

- ・清拭・消毒をしないと感染の原因になることがあるので器具の洗浄・消毒を十分行うこと。

【禁忌・禁止】


- ・本品は手動式生体用洗浄器に用いるためのパッケージ品であり、使用目的以外は使用しないこと。

【形状・構造等】

洗浄嘴管: 洗浄嘴管は、別売パーツになっております。用途に合わせて A タイプ・B タイプ・C タイプをお選びください。


● A タイプ

水の出口 (水平)

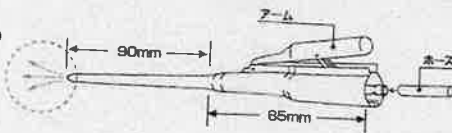

● B タイプ


水の出口 (垂直)

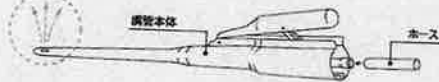

● C タイプセット

※ C タイプは先端のパイプ部分のみを取り替えます。

水の出口 (水平)

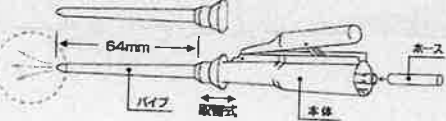

- ・材質 ポリエチレン
- ・本体寸法 全長 175mm 先端径 8.5φ
- ・最大吐出量 1L/分

【性能・使用目的・効能又は効果】

本品は、手動式生体用洗浄器と組合せて、容器から流出する洗浄液を処置部位に衛生洗浄、又は治療に使用することを目的としたパッケージ品である。

【操作方法又は使用方法】

1. 使用前は十分洗浄・消毒を行い使用すること。
2. 洗浄嘴管先端部分に傷、バリ、変形がないことを確認すること。
3. 本品と同時に使用する電気保温洗浄器の取扱説明書に従って、ホース、5L 容器と接続すること。
4. 電気保温洗浄器の取扱説明書の使用方法に従って、衛生洗浄、又は治療に使用すること。

【使用上の注意】

1. 本品は非滅菌品であり、菌の発生を防ぐ為使用前・使用後は必ず清拭・消毒を行うこと。
 - ・ガス滅菌を行う場合は 65℃ 以下で使用する。
 - ・オートクレーブは不可。
 - ・ベンジンやキシロールなどで清拭禁止
2. 接続口にホースを接続するときは、本体とアーム部分を握り接続口に接続すること。
〔握らず接続すると中の O リングが外れる場合がある。〕
3. 故障した場合は、勝手にいじらず「故障中」などの適切な表示を行い、修理は専門家に任せること。
4. 本品は消耗品として扱い、劣化や変色した場合は速やかに交換すること。
5. C タイプのパイプを接続するときは、水分を拭きとって接続してください。水分があるままで接続すると外れやすくなります。

【動作・原理】

手動式生体用洗浄器と本品をシリコンホースもしくは塩ビ系ホースで接続し、落差式にて流れてきた洗浄液を、本品のアーム部を握ることにより液体(薬液)の流量を開閉することが可能。目的部位に噴出することができる。噴射方向は A タイプ B タイプ (左記図水の出口) 方向に噴出することができる。

【貯蔵・保管方法及び試用期間等】

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

有限会社 ダイアモンド電気

住所 : 東京都新宿区高田馬場 4-32-6

グレイスハウス3階

電話 : 03-5331-3351 FAX 03-5331-5330

製造業者

有限会社 ダイアモンド電気

住所 : 東京都新宿区高田馬場 4-32-6

グレイスハウス3階

取扱説明書を必ずご参照下さい。