

機械器具 47 注射針及び穿刺針
管理医療機器 単回使用組織生検用針 12734010

フェザー生検トレパン

再使用禁止

【警告】


- 針管は鋭利であるため、取り扱いに注意すること。
[接触による穿刺等のおそれがある。]

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止。[感染症を引き起こすおそれがある。]
- 本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状

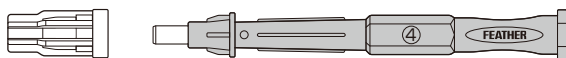

品番	針管サイズ(内径)
FBP-15	1.5mm
FBP-30	3.0mm
FBP-40	4.0mm
FBP-50	5.0mm
FBP-60	6.0mm

組成: 針管/ステンレス鋼
柄/ABS樹脂
キャップ/ポリエチレン樹脂

原理: 本品は、円筒状の刃部を持つパンチ式の皮膚トレパンである。
術者が採取する組織の大きさに合わせ円筒の内径サイズを選
択し、皮膚組織に穿刺し丸く切り抜き組織を採取する。


【使用目的又は効果】

検査、治療又は診断のため、人体に穿刺し、組織採取に使用する。


【使用方法等】

医師の判断により、組織を採取する皮膚の消毒、局所麻酔等、適切な
前処置を行ってください。組織を採取した後は、圧迫、縫合等の適切
な方法で止血してください。

1. 包装を開封して取り出す。

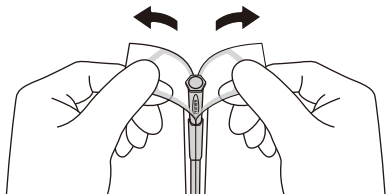

2. キャップを外し、皮膚へ穿刺し組織を採取する。

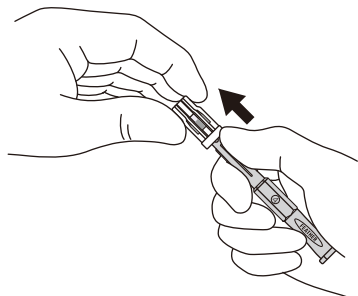

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 穿刺時は皮膚組織の厚さや他の直下の組織に十分注意して使用
すること。[深部組織(腱等)損傷のおそれがある。]

【保管方法及び有効期間等】

- 高温・多湿、直射日光及び水濡れを避けて室温で保管すること。
- 使用期限は製造日より5年。(自己認証による)
例.  ○○○○-○○ は使用期限○○○○年○○月を示す。
- 製造年月日はロットナンバーにより明示。

LOT 00 00 0000

製造年西暦下2桁 製造月 製造バッチ

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売元>フェザー安全剃刀株式会社 美濃工場
岐阜県美濃市松森600-1 TEL.0575-33-1855

<製造元>フェザー安全剃刀株式会社 本社
大阪府大阪市北区大淀南3-3-70 TEL.06-6458-1631

<お問い合わせ先>フェザー安全剃刀株式会社 東京支店
メディカル商品部 TEL.03-3864-0917