

器具 12 理学診療用器具

管理医療機器 人体開口部用超音波プローブカバー JMDN コード：70015000

オカモトプローブカバー ソフトタッチ ポリウレタン

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は未滅菌品である。

- ・主原料：ポリウレタン



- ・寸法

全長：175 ± 5 mm、折幅 52±2mm

【使用目的又は効果】

超音波プローブ（経膈用）に装着し、体液等から保護するために用いること（単回使用のものに限る）。

【使用方法等】

1. 本品を個別包装内の端によせ、本品から遠い端を指で破り、本品にキズをつけないように取り出します。
2. プローブ先端（超音波発信部）に超音波用ゼリーを適量滴下します。
3. 本品を巻き方向に注意してプローブの上に置きます。（逆向きに置きますと巻きほぐせません。）
4. 本品を両手の指でゆっくりとプローブの根元に向かってこがし、プローブ全体に被せます。
5. 被せ終わったらプローブグリップ部と本品の端を一緒に握り、本品を固定したまま操作してください。その際に、本品を引張気味に握りますと、プローブ先端と本品との間の空気を除去しやすくなります。（空気が入りますと画像に影響が出ます。）
6. 使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分してください。

【使用上の注意】

1. 重大な基本的注意

- ・製品が若干巻きほぐしにくいことがありますので、爪やプローブなどでキズをつけぬようにていねいに巻きほぐしてください。そのときのキズが破れの原因となります。

2. 相互作用

- ・薬品、溶剤等によっては膨潤したり浸透したりする場合がありますので確認の上ご使用ください。

【保管方法及び有効期間等】

1) 保管方法

- ・水濡れに注意し、直射日光、オゾン、高温や多湿を避けて保管してください。また、揮発性の成分と一緒に保管しないでください。
- ・購入時の包装に入れたまま保管し、その都度取り出してください。

2) 使用期間（自己認証による）

- ・箱及び/又は袋の記載を参照のこと〔自己認証（当社データ）により設定〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売元〕

オカモト株式会社

東京都文京区本郷 3 丁目 27 番 12 号

03-3817-4172（手袋・メディカル部）