

洗浄用活栓付嘴管

作成又は改訂年月日 2023年4月14日作成（第3版）

販売名 洗浄用活栓付嘴管

届出番号 11B3X10010000005

届出年月 平成 18年10月

一般的名称

一般的名称 34630000 手動式生体用洗浄器

製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等

氏名又は名称 村田医科器械製作所

村 田 秀 夫

第三種医療機器製造販売業

住所等

さいたま市中央区下落合5-15-14

電話番号

048-852-7811

警告


記載なし

禁忌・禁止


記載なし

形状・構造及び原理等

- ①半金属本体：真鍮とABS樹脂
金属部分はニッケルメッキ

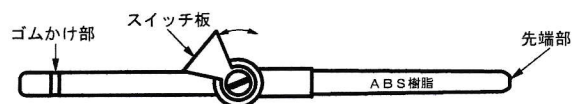

- ②全金属：真鍮 ニッケルメッキ

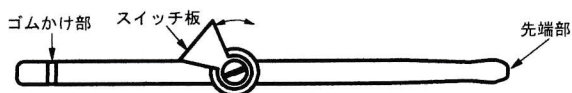

本品は筒状の構造で上図のスイッチ板を左にすると液体が止まり、右にすると液体が流れ、右先端から出る。

使用目的、効能又は効果

女性外陰部の洗浄。診察治療後等に外陰部を洗浄する。

操作方法又は使用方法等

ゴムかけ部のある側（上図参照）にイルリガートルのチューブをつなぎ、つないだ側のパイプの部分を手を持ち、スイッチ板に親指を添える。
スイッチ板がチューブ側にあると温水は出ず、反対側に止まるまで押すと先端部から出るので放水で洗浄する。
また手前に止まるまで戻すと温水が止まる。
本品は未消毒のため使用に際して必ず消毒すること。
〔洗浄および消毒方法〕
全体を熱湯の石鹼水で洗い、消毒用アルコールで清拭する。
再使用にあっても同様に消毒する。

使用上の注意

1 重要な基本的注意

- 1 使用に先立ち本書を熟読し、その内容に従うこと。
- 2 本品は医家向け医療機器であり、使用目的以外に使用しないこと。
- 3 製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 4 併用する医療機器（イルリガートル）に関する指示は、その製造元の添付書類に従うこと。
- 5 本品は患部に接触しないように使用すること。
- 6 本品は分解しないこと。ネジを緩めたりすると正常に作動しなくなります。
- 7 オートクレーブは使用できません。

貯蔵・保管方法及び使用期間等

- 1 貯蔵・保管方法
高温、多湿、直射日光の当たる場所を避け、
常温で清潔な場所に保管すること。
- 2 耐用年数 5年

包装

1 本入／包装 30 本入／箱