

リッチモンド ソフトバイト ブロック

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】

医療用脱脂綿から製造されたロール状の脱脂綿にナイロン撚糸（直径約 0.1mm）を巻き付けたロール状の開口器である。
柔らかくて弾力性があるロール状のものである。

種類（サイズ）	性状	直径×長さ
L	白色のロール状の脱脂綿をナイロン撚糸で巻いてロール状としたもの	19.05mm×101.6mm
M	同上	19.05mm×69.85mm
S	同上	14.29mm×63.5mm
規格（共通）	本品は医療用ガーゼ・医療用脱脂綿基準に適合する医療用脱脂綿を用い、ナイロン撚糸で巻いたロール状のものである。	

【原理】

医療用脱脂綿をロール状にして、ナイロン撚糸を巻き付けたロール状の開口器である。
歯科領域及び医科領域で気道確保、挿入物からの圧迫の回避、検査又は器具の挿入時に用いる。
麻酔覚醒時の歯及び舌の保護に用いる。

【原材料】

医療用脱脂綿：医療用ガーゼ・医療用脱脂綿基準に適合する医療用脱脂綿。
ナイロン撚糸：ロール状の脱脂綿をナイロン撚糸（直径約 0.1mm）で巻き付けてロール状とするナイロン撚糸。

【使用目的又は効果】

- 歯科領域及び医科領域で用いる。
- 患者の口に挿入して患者の口の開口部を拡張させるときに用いる。（気道の確保等）
 - 検査又は他の器具の挿入時に用いる。（検査時、器具の挿入時の部位の圧迫の回避（安全確保等）
 - 麻酔した患者の覚醒時の歯及び舌を保護するのに用いる。（覚醒時に患者が無意識に噛む等の防止：安全確保等）
 - その他前記に準ずる安全確保のために用いる。（安全確保等）

【使用上の注意】

医療用脱脂綿の表面あるいは内部に黄色又は黒色の斑点状のものがみつかることがありますが、これは綿の実殻ですので使用上での心配はありません。

【保管方法及び有効期間等】

【貯蔵・保管方法】

- 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、物理的負荷及び汚染を受けないように保管すること。
- 歯科及び医科の従事者以外が触れないように適切に管理すること。

【使用期限】 10年間（自己認証（当社及び輸入先データによる。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アグサジャパン株式会社
住 所：大阪府中央区玉造 1 丁目 2 番 34 号
電話番号：06-6768-6344
製造業者：BARNHARDT MFG. CO.
製 造 所：RICHMOND DENTAL.
製 造 国： 米国
製造業者：アグサジャパン株式会社