

機械器具 3 2 医療用吸引器
管理医療機器 電動式可搬型吸引器 36616030

*エマジン小型吸引器 おもいやり BM-500S-2

TP-236

*【警告】

- ・使用状況によって、本体の一部の温度が上がり火傷を生じることがあります。（上面：最大 46℃/底面：最大 45℃）【火傷防止のため】
- 【使用方法】
- ・使用前に機能テストを行い、正常な作動を確認してください。【吸引不能防止のため】
- ・使用後は電源プラグをコンセントから外してください。【事故、故障防止のため】


**、*【禁忌・禁止】

- ・採血に使用しないでください。【痰の吸引を目的としているため】
- ・吸引ボトルに薬剤を入れたまま保管しないでください。【ボトルの損傷防止ため】
- ・異なる機種の商品を接続して使用しないでください。【事故、故障防止ため】

*【形状・構造及び原理等】

形状・構造

- ①運転スイッチ ②真空計 ③吸引圧調整ダイヤル ④補助ボトル 22一式 ⑤吸引ボトル 500mL一式 ⑥吸引チューブ

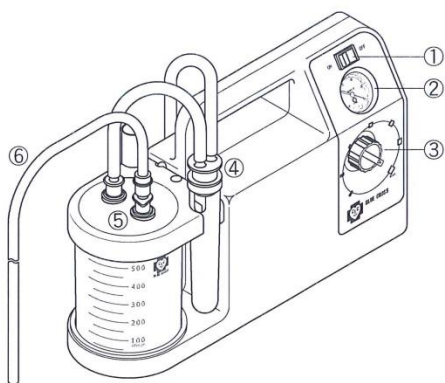

原理

モーターの回転運動が、回転軸に取付けたピストンロッドにより往復運動に変換される。ダイヤフラムが往復することでポンプ室に陰圧が発生し、その陰圧を利用することで連続的に吸引を行う。

定格

電源電圧：AC100V 50/60Hz
電源入力：30VA
吸引圧：-80kPa±10%
排気流量：20L/min±15%
電撃に対する保護の形式：クラスⅡ機器
電撃に対する保護の程度：B形装着部
本製品は EMC 規格 JIS T 0601-1-2:2018 に適合しています。

使用環境条件

周囲温度範囲 +10～+35℃
相対湿度範囲 30～75%（非結露）

*【使用目的又は効果】

外科手術時、救急時等に血液、体液、脂肪等の吸引や、口腔咽頭、鼻腔内等から固形物や液体等の吸引に用いること。

【使用方法等】

- 1) 構成部品を接続してください。
- 2) 運転スイッチが OFF であることを確認し、電源プラグをコンセントに接続してください。
- 3) 運転スイッチを ON にすると吸引が開始されます。
- 4) 吸引圧の調整は、真空計を確認しながら、吸引圧調整ダイヤルを回してください。
- 5) 吸引を行ってください。

【使用後の処理】

- 1) 水を吸引し吸引チューブ内の吸引物を除去してください。
※ボトルに空気がない場合は、吸引物を捨ててから行ってください。
- 2) 運転スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントから外してください。
- 3) 吸引物を捨て、お手入れを実施してください。

【使用上の注意】

- ・構成部品、オプション品を接続する場合は、その互換性、安全性を確認した上で使用してください。
- ・本器は、EMC（電磁両立性）規格 JIS T 0601-1-2:2018 に適合しておりますが、周囲の強い電磁波（携帯電話や無線機の電波、他の機器との近接、静電気、落雷等）により正常に作動しない場合があります。その場合は、設置場所の変更、他の機器との近接回避、運転スイッチを OFF にして電源プラグを外し、再作動させるなどの処置をしてください。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水のかかる場所、高温多湿の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。

輸送及び保管環境条件

周囲温度範囲 -20～+60℃
相対湿度範囲 10～95%（非結露）

耐用期間

6 年（自己認証による）
※消耗品は定期的に交換してください。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- ・使用前に本体が清潔であることを確認する。
- ・使用前に破損や汚れがないことを確認する。
- ・使用前に作動することを確認する。

業者による保守点検事項

- ・一年毎に破損や汚れがないことを確認する。
- ・一年毎に作動することを確認する。

洗浄・消毒

※吸引ボトル 500mL 一式、補助ボトル 22 一式、カテーテル差し（TPX）、吸引チューブ、連結ホースに限る。

- 1) 分解して洗浄してください。
- 2) 消毒の際は、下記の条件をお守りください。
- 3) 洗浄・消毒後は乾燥させ、正しく組み立て正常な働きが得られるようにしてください。

【推奨薬剤】

- ・次亜塩素酸ナトリウム
 - ・グルコン酸クロルヘキシジン
 - ・塩化ベンザルコニウム
- ※薬剤の取扱いは、薬剤の取扱説明書等をお読みください。
※消毒により部品の寿命は変動することがあります。
※両性界面活性型外用殺菌消毒剤等の薬液は使用しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

ブルークロス株式会社
TEL：049-243-9939
www.bluecross-e.co.jp

販売業者（販売店）

取扱説明書を必ずご参照ください。