

機械器具 3 2 医療用吸引器
管理医療機器 電動式可搬型吸引器 36616030

***吸引器 3WAY**

TP-239

***【警告】**

- ・長時間使用した後や使用状況によって、本体の一部（底面）の温度が最大 49℃になります。火傷を生じることがあるため、熱いと感じたら触らないでください。〔火傷防止のため〕
- 〔使用方法〕
- ・使用前に機能テストを行い、正常な作動を確認してください。〔吸引不能防止のため〕
- ・使用後は電源プラグをコンセントから外してください。〔事故、故障防止のため〕


****、*【禁忌・禁止】**

- ・採血に使用しないでください。〔痰の吸引を目的としているため〕
- ・本品、シガーライターケーブル（別途購入品）は防水構造ではありません。水のかかる場所で使用しないでください。〔事故、故障防止のため〕
- ・吸引ボトルに薬剤を入れたまま保管しないでください。〔ボトルの損傷防止のため〕
- ・異なる機種 of 構成部品を接続して使用しないでください。〔事故、故障防止のため〕

***【形状・構造及び原理等】**

形状・構造

- ①運転スイッチ ②ECOスイッチ ③バッテリーランプ ④真空計 ⑤吸引圧調整ダイヤル ⑥補助ボトル 2 2 一式 ⑦吸引ボトル 750 mL 一式 ⑧吸引チューブ ⑨カテーテル（別途購入品）

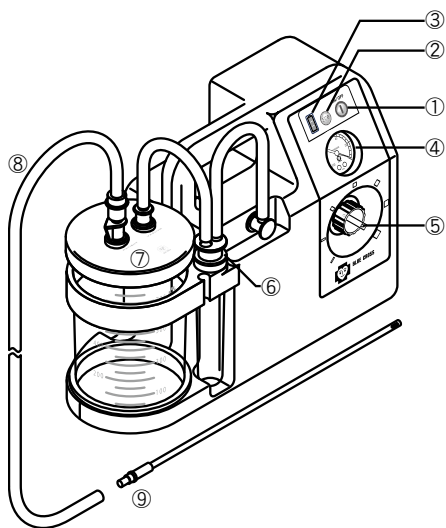

原理

モーターの回転運動が、回転軸に取付けたピストンロッドにより往復運動に変換される。ダイヤフラムが往復することでポンプ室に陰圧が発生し、その陰圧を利用することで連続的に吸引を行う。

電気的定格

交流電源使用時

電源電圧：AC100V 50/60Hz

電源入力：40VA

シガーソケット使用時

電源電圧：DC12V、2A

電源入力：24VA

電撃に対する保護の形式：クラスⅡ機器／内部電源機器

電撃に対する保護の程度：B 形装着部（本製品はカテーテルを装備していません）

バッテリー：12V1500mAh

バッテリー充電時間：約 90 分*

バッテリー運転時間：約 90 分（無負荷、連続運転、満充電）*

※新品時当社測定結果

本製品は EMC 規格 JIS T 0601-1-2:2023 に適合しています。

仕様

吸引圧：-80kPa±10%

排気流量：25L/min±15%

使用環境条件

周囲温度範囲 +10～+35℃

相対湿度範囲 30～75%（非結露）

【使用目的又は効果】

外科手術時、救急時等に血液、体液、脂肪等の吸引に用いること。

【使用方法等】

- 1) 構成部品を接続してください。
※カテーテルは気管支吸引用カテーテル（一般的名称）を推奨します。
- 2) 電源プラグをコンセントに接続してください。
- 3) 運転スイッチを押すと点灯し、吸引が開始されます。
- 4) 吸引圧の調整は、真空計を確認しながら吸引圧調整ダイヤルを回してください。
- 5) 吸引を行ってください。

〔ECO 運転〕

ECO スwitch を押すと点灯し ECO 運転となり、もう一度押すと解除され消灯します。

〔使用後の処理〕

- 1) 水を吸引し吸引チューブ内の吸引物を除去してください。
※吸引ボトルに空きがない場合は、吸引物を捨ててから行ってください。
- 2) 運転スイッチを押すと運転は止まり消灯します。
電源プラグをコンセントから外してください。
※一度 OFF にすると ECO 運転は解除されます。
- 3) 吸引物を捨て、お手入れを実施してください。

***【使用上の注意】**

- ・構成部品、オプション部品を接続する場合は、その互換性、安全性を確認した上で使用してください。
- ・本器は、EMC（電磁両立性）規格 JIS T 0601-1-2:2023 に適合しておりますが、周囲の強い電磁波（携帯電話や無線機の電波、他の機器との近接、静電気、落雷等）により状況と異なるランプの点灯や正常に作動しない場合があります。その場合は、設置場所の変更、他の機器との近接回避、運転スイッチを OFF にして電源プラグを外し、再作動させるなどの処置をしてください。
- ・本器は航空機搭載可能基準に適合していません。
- ・車内で使用する場合は、駐車又は停車した状態で使用してください。走行中は使用しないでください。
- ・車内でシガーライターケーブルを使用する際は、車載バッテリーの故障（バッテリー上がり等）に注意してください。
- ・本器は安定した水平な場所に設置してください。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水のかかる場所、高温多湿の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。

輸送及び保管環境条件

周囲温度範囲 -20～+60℃

相対湿度範囲 10～95%（非結露）

耐用期間

6 年（自己認証による）

※消耗品は定期的に交換してください。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- ・使用前に本体が清潔であることを確認する。
- ・使用前に破損や汚れがないことを確認する。
- ・使用前に作動することを確認する。

業者による保守点検事項

- ・一年毎に破損や汚れがないことを確認する。
- ・一年毎に作動することを確認する。

洗浄・消毒

※吸引ボトル750mL一式、カテーテル差し（PC）、補助ボトル22一式、吸引チューブ、連結ホースに限る。

- 1) 分解して洗浄してください。
- 2) 消毒の際は、下記の条件をお守りください。
- 3) 洗浄・消毒後は乾燥させ、正しく組み立て正常な働きが得られるようにしてください。

【推奨薬剤】

- ・次亜塩素酸ナトリウム
- ・グルコン酸クロルヘキシジン
- ・塩化ベンザルコニウム

※薬剤の取扱いは、薬剤の取扱説明書等をお読みください。

※消毒により部品の寿命は変動することがあります。

※両性界面活性型外用殺菌消毒剤等の薬液は使用しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

ブルークロス株式会社

T E L : 0 4 9 - 2 4 3 - 9 9 3 9

www. bluecross-e. co. jp

販売業者（販売店）

--