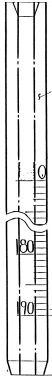


器 17 血液検査用機器
一般医療機器 赤血球沈降速度測定器具
ニチペット C

JMDNコード：55974001

再使用禁止**【禁忌・禁止】**

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】**1) 外観・各部の名称及び成分**

構成部名称	原材料
棒状管	ポリスチレン（100%）
ピストン	ポリエチレン（100%）
目盛りインク	エナメル系塗料キシレン10%含（ブルー系）

2) 製品構成

本製品には下記の種類がある。

品 名	タイプ	サイズ
ニチペット C	N（ストッパーなし）	φ6.0/2.55 L=300

3) 原理

本製品は、ガラス管よりも軟質性と弾力性があり、操作が容易で、且つ多数検体を短時間で処理できる。

【使用目的、効能又は効果】

本品は、血液一般検査法の Westergren 法に準じた検査に使用するプラスチック管であり、血液の赤血球沈降速度を測定するのに用いる。

【品目仕様】

目盛の公差は、0.5mm以下であること。

【操作方法又は使用方法等（用法・用量を含む）】

クエン酸ナトリウム入り試験管に血液を採血し、その血液を赤沈管の下部より挿入する。赤沈検査方法に従って赤沈を測定する。

<操作手順>

- (1) 所定のクエン酸液を加えて混和した血液を注射筒などで赤沈管に入れる。
- (2) そのまま測定機（赤沈台）に垂直に静置する。
- (3) 所定の時間に赤沈値を読む。
- (4) 使用後は安全な方法で処理を行う。

【使用上の注意】**重要な基本的注意**

- (1) 熟練した者以外は本品を使用しないこと
- (2) 本品はディスポーザブル製品であるので、1回限りの使用で使い捨て、再使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】**1. 貯蔵・保管方法**

- (1) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気等により悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
- (2) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

2. 使用の期限

3年（自己認証データによる）

【包装】

品 名	タイプ	包装単位
ニチペット C	N φ6.0/2.55 L=300	250本

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

1. 製造販売元
株式会社ベネフィット
〒399-4605 長野県上伊那郡箕輪町大字中曽根 599
TEL 0265-79-0030
2. 製造元
株式会社ベネフィット
〒399-4605 長野県上伊那郡箕輪町大字中曽根 599
3. 販売元（連絡先）
日本臨牀器械工業株式会社
〒133-0051 東京都江戸川区北小岩 3-4-1
TEL 03-3671-0527 FAX 03-3673-0172