

類別: 整形用品
医療機器分類: 管理医療機器
一般的名称: 単回使用クラスⅡ処置キット/透析開始・終了セット

NBM処置パック

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止。
- ・構成品の内、天然ゴム製手術用手袋、その他雑品（駆血チューブ）に天然ゴムを使用しています。
天然ゴムは、かゆみ、発疹、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショック等のアレルギー性症状をまれに起こす事があります。この様な症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を施して下さい。

【形状・構造及び原理等】

本組合せ医療機器は、以下に示す構成品のうち、2品目以上の構成品を組合せて構成するが、組合せによって同梱されない構成品もある。なお、構成内容は別紙に記載する。

(構成品)**

分類	品名	用途
① 医療機器	NPガーゼ	創傷面の保護、血液・体液の吸収、及び薬剤の塗布等に用いる。
	NPドレープ	手術室や処置室の汚染(器具やテーブルの上)から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる。
	ピンセット	収納される構成品を用いて、創傷面の処置、被覆及び保護を行う際に用いる。
	インジェクションパッド NS	軽微な創傷面の保護、手術後の縫合部の被覆保護、注射針等の穿刺部の被覆保護等に用いる。
	ステプティ NS	
	チューシャパン NS	
	ケアリーヴ NS	
	オーキューパンエコ NS	
	ガードスティック NS	
	インジェクションパッドマイルド NS	
	カテリーパッドマイルド NS	手術、処置等に用いる場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。
	天然ゴム製手術用手袋 非天然ゴム製手術用手袋	
	かん子	
	カテリーブFSタブ NS	注射針又はカテーテル刺入部位に直接貼付してその固定に用いる。
	ケアリーヴHC NS	
② その他構成品	綿棒	薬剤塗布等外科用処置に用いる。
	止血用圧迫綿	穿刺部止血圧迫に用いる。
	パッド	圧迫補助材及び穿刺針と皮膚の緩衝材に用いる。
	綿球	
	カット綿	
	防水シート	外科用処置領域の汚染防止の為に用いる。
	固定テープ	ガーゼ及び器具の皮膚への固定に用いる。
	その他雑品	


【使用目的又は効果】

創面の処置、被覆、保護

【使用方法等】

形態1

- ①トレーから滅菌紙を剥がす。
- ②収納されている品目を用いて、創傷面の処置、被覆及び保護を行う。

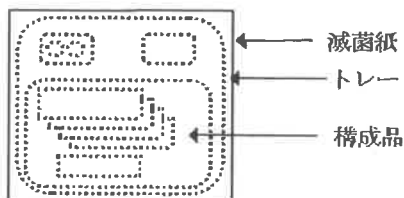


形態2

- ①滅菌袋を開封する。
- ②収納されている品目を用いて、創傷面の処置、被覆及び保護を行う。



形態3

- ①滅菌袋を開封する。
- ②レーヨン紙で包んであるトレーから、収納されている品目を用いて、創傷面の処置、被覆及び保護を行う。

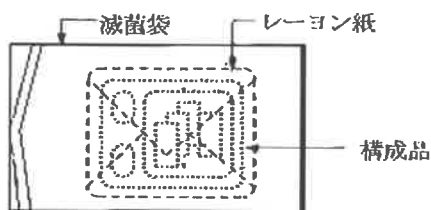

【使用上の注意】**

- ・この製品は『使用一回限り』です。再使用はしないで下さい。
- ・内容物が飛び出したり、滅菌紙が破れたりする場合がありますので、開封の際はご注意下さい。
- ・構成品の綿棒の軸には天然木を使用しておりますため木目の入り方や力を入れすぎた場合には折れることがありますので、ご使用の際は十分ご注意下さい。
- ・救急絆創膏及び粘着テープの使用により、発疹、発赤、かゆみ等が生じた場合には、使用を中止して下さい。
- ・本製品の容器、内容物は廃却可能です。

【保管方法及び使用期間等】**

- ・高温、多湿、直射日光の当る場所を避けて保管して下さい。
- ・使用期限は、外箱及び製品に表示。「自己認証による(自社データ)」

【取扱い上の注意】**

- ・水濡れに注意して保管して下さい。

【製造販売業者の名称及び住所等】

ニチバンメディカル株式会社
〒838-0815 福岡県朝倉郡筑前町野町字禅門橋1713
TEL0946-24-8021

【製造業者】

ニチバンメディカル株式会社