

機械器具34 医療用刀

管理医療機器 単回使用メス JMDNコード：35130002

K A I セーフティースカルペル


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止。
- ・再滅菌しないこと。
- ・使用期限が過ぎている場合には使用しないこと。
- ・包装の破損等により製品の無菌性が損なわれていると考えられる場合には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 外観図

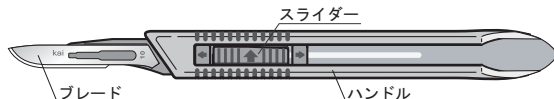


2. 材質

ブレード：ステンレス鋼

ハンドル／スライダー：ポリアミド

3. 主なブレード形状

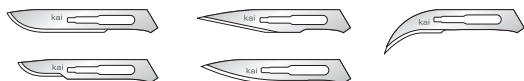

【使用目的、効能又は効果】

本製品は、手術時に用いられる刀である。本品は単回使用である。

【操作方法又は使用方法等】

① 使用前確認

滅菌袋に破損等がないことを確認した後に開封し、製品を袋から取り出します。


製品に損傷等がないことを確認した後、直ちに使用してください。

② 操作方法

通常の手術方法に従い、メスの操作を行って下さい。

1. ブレードの突き出し方法

スライダー部分を指で保持した状態で上に持ち上げ、そのまま前に押し出して下さい。その際、スライダー部分が完全に固定されていることを確認してください。

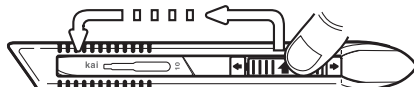

2. ブレードの収納方法

スライダー部分を指で保持した状態で上に持ち上げ、そのまま後ろに戻して下さい。その際、スライダー部分が完全に固定されていることを確認してください。



【使用上の注意】

重要な基本的注意

- (1) 医療用の目的以外には使用しないこと。
- (2) 使用目的に応じて適切な品種選択を行い、通常の手術手順に従い使用すること。
- (3) 本製品を開封しブレードを出す際には、刃先に注意しながら取り出すこと。刃先が異物に接触した場合は、その製品を使用せず、新しいものと交換すること。
- (4) 本製品を取り扱う際、刃先に触れてけがをしないように、取り扱いには注意すること。
- (5) 本製品はγ線滅菌済であり、手術直前まで開封しないこと。
- (6) 使用後はブレードをハンドルの中に収納し、必ず完全に固定された状態で処理すること。
- (7) 使用後の廃棄は、医療廃棄物として適切に処理し、施設外における感染、環境への汚染が起きないようにすること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- (1) 高温、多湿、直射日光及び水濡れを避け、室温で保管すること。
- (2) 清潔な場所に荷重のかからない状態で保管すること。
- (3) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- (4) 包装材料を傷つけたり、ピンホールを生じたりしないように保管すること。

2. 使用の期限

- ・使用期限が個装及び外装に記載されているので必ず確認すること。
[使用期限は自己認証による]
- ・個装及び外装に記載されている使用期限を確認し、使用期限を過ぎたものは廃棄すること。

【包装】

包装単位： 10本／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者名称：カイ インダストリーズ株式会社

住 所：〒501-3992 岐阜県関市小屋名1110

電 話 番 号：0575-28-6600

製 造 業 者 名 称：カイ インダストリーズ株式会社