

医療用品（4）整形用品  
一般医療機器 救急絆創膏  
JMDNコード 34864000  
**インジェクションパッド**  
INJECTION PAD

再使用禁止


**【禁忌・禁止】**

再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】**

本品は、パルプ・ポリエステル不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布したテープと、不織布パッドからなる静脈注射、採血、予防注射、関節穿刺後の止血用ドレッシング材である。

本品は滅菌済みである。

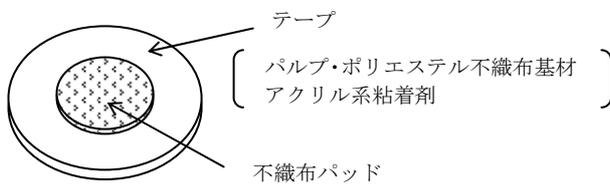

基材色：白色

品番	サイズ	
	テープ	パッド
No.30	直径30mm	直径10mm
No.36	直径36mm	直径16mm

基材色：ベージュ色

品番	サイズ	
	テープ	パッド
No.30A	直径30mm	直径10mm
No.36A	直径36mm	直径16mm

**【使用目的又は効果】**

傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

**【使用方法等】**

包装を開いて本品を取り出し、穿刺部にパッドをあてて周りのテープで固定する。

**【使用上の注意】**

**1.重要な基本的注意**

- 1) 本品の使用中に、貼付部位に感染又は皮膚障害（発疹・発赤、かゆみ等）と思われる症状が現れた場合は、使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- 2) 本品の使用中に、濡れたり汚れたりした場合、もしくは血液や浸出液などの漏れがみられた場合は、直ちに新しいものに貼りかえること。

**2.その他の注意**

- 1) 開封後は、直ちに使用すること。
- 2) 使用後は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがすこと。

**【保管方法及び有効期間等】**

保管方法：水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存する。

使用期限：個箱に表示（自己認証データによる）

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

[製造販売元]

ニチバン株式会社

[お問い合わせ窓口]

ニチバン株式会社 お客様相談室

〒112-8663 東京都文京区関口2-3-3

TEL 03-5978-5622

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日を除く）