

2013年04月01日作成 (Ver.1)

認証番号：外箱に表示

衛生用品02 コンドーム
管理医療機器 男性向け避妊用コンドーム JMDNコード：36282000
販売名：外箱に表示

再使用禁止

【警告】

コンドームの適正な使用は、避妊に効果があり、エイズを含むほかの多くの性感染症に感染する危険を減少しますが、100%の効果を保証するものではありません。

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 油性物質及び揮発性物質との接触禁止
- 天然ゴムのアレルギー

【性能、使用目的、効果又は効果】
避妊、性感染症予防の補助

【形状、構造及び原理等】

外箱に表示

成分名	含量	備考
添加物	カゼイン0.05%以下	牛の乳からの抽出物

本医療機器は、製造工程において、牛の乳由来成分（カゼイン）を使用している。

【操作方法又は使用方法等】

- ①コンドームは性器接触前にペニスが勃起状態になってから、ペニスに装着してください。
- ②使用前にコンドームを個別包装内の端によせ、コンドームから薄い端を指で破り、コンドームにキズを付けないように取り出してください。（図1）
- ③コンドームには表裏があります。表裏をよく見てから亀頭の上に置きます。（図2）
この際、空気を抱きこまないように、コンドームの先端の精液溜まり部分を軽く押さえてください。（図3）
- ④コンドームを、ゆっくりと両手の指でペニスの根元に向かってのりながら、根元までかぶせてください。（図4）この際、表裏を間違えると装着ができません。必要以上の巻きほくしは、コンドームの脱落の原因になる可能性があります。
- ⑤射精後は、速やかにコンドームを押さえながら、ゆっくりと膣外へ抜き出してください。



図1



図2



図3



図4

【使用上の注意】

- ①コンドームの使用は、1個につき1回限りです。
その都度、新しいコンドームをご使用ください。
- ②個別包装のままに保管及び携帯をしないでください。
- ③コンドームには爪や歯、その他硬いものに強く触れないようにしてください。
そのときのキズが使用中の破れの原因となります。
- ④このコンドームは男性のペニスに装着し、女性の膣内に挿入する行為に適用するように設計されています。これ以外の使用は破れる危険があります。
- ⑤この製品は、天然ゴムラテックスを素材としています。
天然ゴムは、かゆみ、発赤、じんましん、むくみ、発熱、呼吸困難、ぜんそく様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状を起こすことがあります。
このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師または薬剤師に相談してください。
- ⑥エイズ（AIDS）を含む性感染症は、接触感染ですのでコンドームは必ず性器接触前に装着してください。精子は、射精時のみならず射精前後でも流出します。
引き続き性行為を行う時は特にご注意ください。
- ⑦追加の潤滑剤を使用する場合には、コンドームの強度を低下させるような潤滑剤は、使用しないでください。
- ⑧膣内に挿入する坐剤、外部性器に塗布する軟膏などの医薬品やベビーオイル、マーガリン、ローション、ハンドクリームなどと接触すると、コンドームが劣化し、破れる危険があります。コンドームの使用時には、これらと接触しないように注意してください。
- ⑨使用期限を過ぎたコンドームは破れる危険がありますので使用しないでください。
- ⑩使用したコンドームは、水洗トイレに流さず、各自自治体の処分方法に従ってください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- ①貯蔵・保管方法
 - a) 直射日光の当たらない場所
 - b) 高温多湿でない場所
 - c) 防虫剤などの揮発性物質のない場所
- ②使用期限
外箱の使用期限欄を参照のこと。

【包装】

外箱に表示

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

- 製造販売業者
不二ラテックス株式会社
栃木県栃木市国府町150
電話番号：0282-27-5656（代表）
- 製造業者
不二ラテックス株式会社
東京都千代田区神田錦町3-19-1

お客様相談室 ☎0282-27-0193

ホームページアドレス <http://www.fujilatex.co.jp/>

受付時間 9:00～17:00
(土・日・祝日を除く)