

2006年9月21日作成

届出番号：13B3X00095000001

器75 脱疾治療用具 30883000 脱疾治療用ストラップ 一般医療機器


スチール脱腸帯

【禁忌・禁止】

バネ（スプリング）を180度以上、反対の角度に反らさないこと

【形状・構造等】

点線部分にバネが入っています

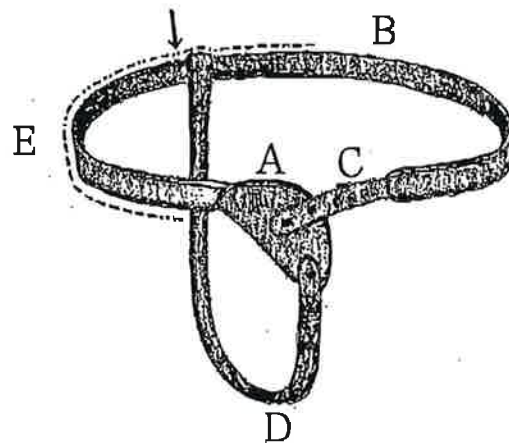

A.押圧部 B.ベルト C.ペロ（止め皮） D.股吊紐 E.バネ（スプリング）

【使用目的・効能又は効果】

腹部の孔（ソケイ管）から脱出する腸をバネの発条力を利用し患部を圧止して孔口を小さくなし脱出を防止する効能を有する

【操作方法又は使用方法】

本器を直接腰部に装着し患部を押さえる

【使用上の注意】

脱出した腸を体内の正常の位置に戻した状態で本器を装着して下さい

なるべく下着の上から本器を装着して下さい

就寝時、入浴時は本器を取り外して下さい

【包装】

1個/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

株式会社 森田スチール本舗

〒170-0003 東京都豊島区駒込2-8-6

TEL 03-3910-3591

FAX 03-3910-3403