

器50 開創又は開孔用器具

一般医療機器 一般的名称：開孔器 JMDN コード：35517000

マツヨシ 開孔器

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用目的以外に使用しないで下さい。
2. すべての操作において、定められた操作・使用目的以外の操作をしないでください。
3. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

No	タイプ	
1	デイスポーザブル舌圧子付き鼻鏡 先端幅×先端長×全長×舌圧子幅 約5×20×170×16mm	
2	デイスポーザブル耳鏡 先端径×基部径×長さ 約5×20×40mm	

2. 原材料・材質

- (1) デイスポーザブル舌圧子付き鼻鏡
ポリプロピレン、EOG滅菌済み
- (2) デイスポーザブル耳鏡
ポリプロピレン、EOG滅菌済み

【使用目的又は効果】

本製品は、転心で結合した2つのアームからなる手術器具をいう。様々なサイズ、形状及び輪郭のものがある。遠位端は丸く、挿入して開孔するときに内腔、身体開口部又は管を拡張又は伸張することができる。検査又は他の器具の挿入時に用いる。通常、ステンレス製であるが、プラスチック製のものもある。転心近位のアームは通常ハンドルとなっており、転心遠位のアームは力が増えられたときに開くようになっている。

【使用方法等】

1. デイスポーザブル舌圧子付き鼻鏡

- (1) 滅菌バッグを開封し、上部から1個ずつ取り出し、舌圧子で舌を押さえて咽頭部を検診し、器具の反対側の鼻鏡で鼻を開き鼻内部を検診してください。
- (2) 本製品は汚染防止のため、両端の舌圧子及び鼻鏡部分はさわらずに使用してください。

2. デイスポーザブル耳鏡

- (1) 滅菌バッグを開封し、上部から1個ずつ取り出し、耳の中を耳鏡器を用いて検診する。
- (2) 本製品は汚染防止のため、耳鏡器の細い先端部はさわらずに使用してください。

【使用上の注意】

〈使用注意〉

1. 包装の開封方法

- (1) 開封は消毒又は滅菌をした清潔なハサミを使用して開封してください。
- (2) 開封用ハサミの消毒・滅菌について
20分以上の沸騰消毒又はオートクレーブ滅菌を推奨します。

2. 使用目的以外に使用しないでください。

3. 本製品を加工・改造しないでください。

4. 定められた操作・使用方法以外の使用をしないでください。

5. 故障または異常が発生したときは使用を中止し、速やかに適切かつ安全な処置を行ってください。

〈重要な基本的注意〉

1. デイスポーザブル舌圧子付き鼻鏡

- (1) 滅菌バッグを開封したら直ちに使用してください。
- (2) 万一未使用のものが残っても、開封後は滅菌の効果がありませんので廃棄してください。
- (3) 製品には万全を期していますが、万一包装が破損していたり不都合が認められた場合には使用しないでください。
- (4) 喉の奥まで舌圧子を入れすぎないように、また鼻の奥まで鼻鏡を入れすぎないように注意してください。
- (5) 使用後は感染防止に留意し、安全な方法で処分してください。

2. デイスポーザブル耳鏡

- (1) 滅菌バッグを開封したら直ちに使用してください。
- (2) 万一未使用のものが残っても、開封後は滅菌の効果がありませんので廃棄してください。
- (3) 製品には万全を期していますが、万一包装が破損又は不都合が認められた場合には使用しないでください。
- (4) 耳の奥まで耳鏡器を入れすぎないように注意してください。
- (5) 使用後は感染防止に留意し、安全な方法で処分してください。

〈相互作用〉

この包装が開封されるか又は傷付けられるまで無菌です。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

品質保持のため、直射日光や高温の場所を避け、なるべく湿気の少ない涼しいところに保管してください。

〈使用期限〉

滅菌後 3 年として使用期限を表示。(自己認証による)

【包装】

1. デイスポーザブル舌圧子付き鼻鏡
10本×5袋入り
2. マツヨシ デイスポーザブル耳鏡
10個×5袋入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者

松吉医科器械株式会社
住所：〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9
電話：03-5816-8819

2. 製造業者

岩崎工業株式会社 三重プラント(日本)