

医療用品 5 副本

一般醫療機器 成形副本 35354000

ネックロックサービカルエクストリクションカラー

【警告】

1. 使用方法

(1) 感染症を防ぐため、一人の患者に一組の使用が推奨される。


【禁忌・禁止】

1. 使用方法

- (1) 使用目的以外の用途で使用しないこと。
- (2) 本品を曲げ、切削、打刻(刻印)等の二次的加工(改造)をすることは、折損等の原因となるので絶対に行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状、構成

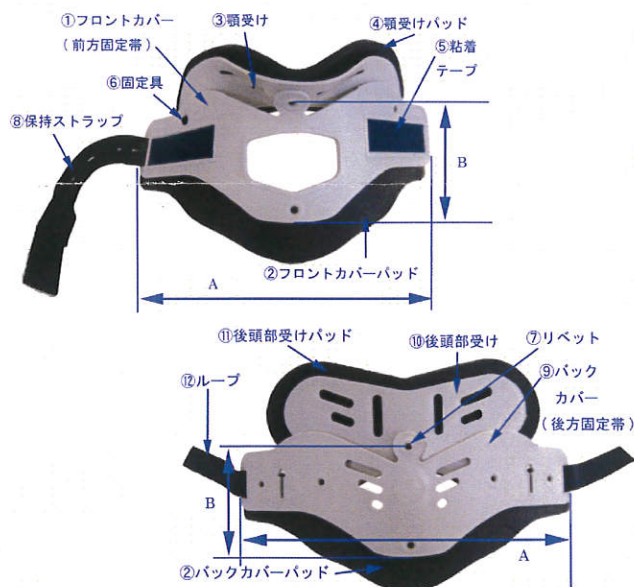

商品 コード	規格	巾A(mm)		高さB(mm)	
		前面	バック面	前面	バック面
NL-200EL	STOUT	359.0	359.0	90.0	89.0
NL-250E	XS	239.0	239.0	90.0	90.0
NL-300E	SMALL	298.0	298.0	88.0	88.0
NL-400E	MEDIUM	298.0	298.0	105.0	105.0
NL-500E	LARGE	332.0	332.0	115.0	115.0
NL-P1	0歳～2歳	223.0	210.0	77.0	114.0
NL-P2	2歳～6歳	244.0	232.0	99.0	107.0
NL-P3	6歳～12歳	269.0	251.0	113.0	131.0

2. 原材料

外郭部：低密度ポリエチレン、発泡スチロール、ナイロンルー
プ首当て部：低密度ポリエチレン、発泡スチロール、ナイロン

3. 原理

頸椎や脊髄の保護や損傷を防止するため、頭頸部を中央位置

に維持し、前後左右に曲ることのないように固定する。同時に
 脊髄のひねり・圧迫による、生理学的な損傷、虚血性の損傷が
 脊髄に加わることを防ぐ。

【使用目的、効能又は効果】

事故等で、患者を搬送する際、患者の首を固定するために使用する。

【品目仕様等】

1. 外觀
2. 寸法

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用前の確認

本品が十分に洗淨されていることを確認する。

2. 準備・操作

- (1) 指を使って簡易の方法で患者の顎から肩までの垂直距離を測り、患者に適合したサイズを選択する。
- (2) フロントカバー(前方固定帯)の顎受け用の黒いウレタンパッドをひねり起こして黒色の固定具を所定の穴に挿入する。
- (3) フロントカバーを患者の顎下にあてがう。このときフロントカバーにある保持ストラップの上縁ラインが患者の顎の線より下になっていることを確認する。
- (4) 保持ストラップを患者の首後部にまわし仮留めする。
- (5) バックカバー(後方固定帯)を患者の後部の中心にきちんとあてがい、色の付いた保持ストラップを両側から左右対称になるように手前に引き、フロントカバーの保持ストラップに留める。
- (6) 患者の顎が顎受けの中心にフィットしているか、患者の首を適切にサポートしているか等、装着状態を確認する。
- (7) 患者が横たわっている場合、バックカバーを患者の下にスライドさせて固定することもできる。

3. 使用後

- (1) パッドをカバー部（固定帯）から外す。
- (2) カバー（固定具）を洗淨する場合、1：10の割合で希釈消毒剤：水を使用する。
- (3) 必要に応じ、乾燥し保管する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品は、使用するために必要な知識、技術に習熟した医師が使用するよう設計されている。本書に記載されている全ての注意、指示を熟読し遵守して使用すること。
- (2) 使用前に、破損・変形亀裂・傷・磨耗がないか、適切に機能するかどうかを点検すること。破損等が確認された場合は使用しないこと。
- (3) 破損、曲がり等の原因になり得るので使用時には必要以上の力を加えないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

清潔な場所に室温で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

再使用時は、【操作方法又は使用方法等】3. に示したように洗浄したことを確認すること。

【包装】

1 式／袋

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】＊

製造販売者

ユフ精器株式会社

〒113-0034

東京都文京区湯島 2 丁目 31 番 20 号

T E L : 03-3811-1131

F A X : 03-3811-1727

外国製造業者＊

オズール ノース アメリカ（メキシコ）

Ossur North America (Mexico)