

医05 副木
一般医療機器 成形副木 35354000

ドルフソフト

【形状・構造及び原理等】

本品は、芯材にソフトウレタンを使用した頸椎固定用シーネである。表面素材に抗菌防臭加工を施したのものもある。頸部を固定することにより頸椎損傷部への負担を軽減する。

【使用目的又は効果】

損傷した頸椎部位を固定（保護、安静保持）するために用いる。

【使用方法等】

[0号]

前屈位固定の場合

- ・二つに分かれている本体の小さい方がとがっている側を下にして顎に当てる。
- ・本体の大きい方がとがっている側を上にしてうなじに当てる。
- ・本体同士を両側の面ファスナーで留める。

後屈位固定の場合

- ・二つに分かれている本体の大きい方がとがっている側を下にして顎に当てる。
- ・本体の小さい方がとがっている側を下にしてうなじに当てる。
- ・本体同士を両側の面ファスナーで留める。

[1号]

- ・アジャスターを本体から取り外す。
- ・取り外したアジャスターで高さを調整して本体に取り付ける。
- ・カバーを本体に取り付ける。
- ・上下を確認し、本体の凹んでいる部分に顎をあてる。
- ・首に巻き、首の後ろで面ファスナーを留める。

[2号、3号、4号]

- ・上下を確認し、本体の凹んでいる部分に顎をあてる。
- ・首に巻き、首の後ろで面ファスナーを留める。

【使用上の注意】

- ・ご使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。
- ・頸椎固定以外の用途には、使用しないでください。
- ・本品は頸椎の保護、安静保持を目的としていますが、ご使用状況やご使用者の健康状態によって必ずしも完全に保護できるわけではございません。ご使用中に異常を感じた場合は、使用を中断し医師に相談してください。
- ・ご使用の際は、面ファスナーが直接肌にあたらないように装着してください。
- ・面ファスナーを着衣に引っかけないようにご注意ください。
- ・カバーが添付されている製品は必ずカバーをご使用ください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光、火気及び高温を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 株式会社 竹虎

神奈川県横浜市瀬谷区卸本町 9279-69

製造業者 株式会社 竹虎 東日本物流センター

竹下製薬株式会社 新潟工場

TAKETORA PHILIPPINES, INC. (フィリピン)

発売元 株式会社 竹虎

商品に関するお問合せ先 フリーダイヤル 0120-094-315