

機械器具 39 医療用鉗子(電動式のものを除く)

鉗子(JMDN コード 10861001)一般医療機器


鉗子

【禁忌・禁止】

- ・本製品を曲げ、切削、打刻(刻印)等の二次的加工(改造)することは、折損等の原因となるので絶対に行わないこと。
- ・本製品は未滅菌ですので、使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。
- ・製品本来の使用目的と違う用途で使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 本製品はステンレス鋼で、形状は直、反、先端は無鉤又は有鉤
2. 代表例

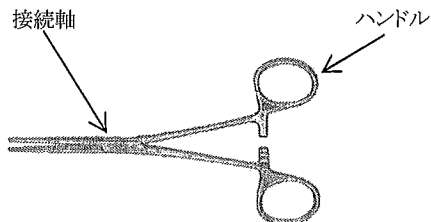

3. 種類

- | | | | |
|--------|---------|--------|---------|
| ①止血鉗子 | ②麦粒鉗子 | ③器械鉗子 | ④生検用鉗子 |
| ⑤注射器鉗子 | ⑥産科用鉗子 | ⑦結紮鉗子 | ⑧消毒鉗子 |
| ⑨骨鉗子 | ⑩耳科用鉗子 | ⑪腸腎臓鉗子 | ⑫気管支用鉗子 |
| ⑬舌鉗子 | ⑭アリス鉗子等 | | |

4. 原理

接続軸のある2枚の先端部分からなり、物体の上で2枚の先端部を閉じることによって保持できる。

【使用目的、効能又は効果】

臓器、組織又は血管を非外傷的に把持・圧迫・結合又は支持するために等に使用。

【品目仕様等】

外観は、目視検査にて表面に機能を損なうような欠陥ないこと。

【操作方法又は使用方法】

1. 本品のハンドルを手に持ち操作することにより、先端部が開閉し臓器、組織又は血管を非外傷性に把持・圧迫・結合又は支持する。
2. 本品は未滅菌ですので、使用前に洗浄・滅菌されていることを確認してください。
3. 使用後も洗浄・滅菌し、次の使用に備えて適切に保管してください。

【使用上の注意】

1. 使用前に必ず洗浄・滅菌処理を行うこと。
2. 使用前に本品に傷、変形や損傷がないこと、稼働部に異常等がないことを必ず確認すること。
3. 本品に異常がある場合は、又は破損している場合は、使用しないこと。
4. 本品を使用するにあたっては、装置と技術に対する適切な理解が必要です。手技に習熟した方以外は使用をしないでください。誤った使用法は、本品の損傷を招く恐れがあります。

【貯蔵・保管方法及び使用期限等】

1. 貯蔵・保管にあたっては、高温・多湿を避け、腐食を防ぐために保管期間にかかわらず乾燥した清潔な場所に保管すること。水濡れは絶対に避けること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、職業感染防止のために洗浄・消毒すること。
2. 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な温度で使用すること。
3. 洗浄装置(超音波洗浄装置)で洗浄するときは、刃物同士接触して刃先を破損することがないように注意すること。また、ラチェット部等の稼働部分は開放して、汚れが落ちやすいようにバスケット等に収納すること。
4. 洗剤の残留がないように十分にすすぎをすること。
5. 洗浄後は、腐食防止のため、直ちに乾燥すること。
6. 稼働部の動きをスムーズにするために、水溶性潤滑剤を塗布することを推奨する。
7. 使用(滅菌)前に、汚れ、傷、曲がり、歯の損傷、稼働部の動き等に異常がないか点検をすること。
8. 点検後、セット・包装をし、高圧蒸気滅菌をすること。なお、滅菌のためのセット・包装にあたっては、ラチェット部等の可動部は開放するなど、確実に滅菌できるように配慮すること。
9. 強アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させるおそれがあるので、使用を避けること。金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は、器具の表面が破損するので汚物除去及び洗浄時の使用しないこと。

【包装】

1個、5個、10個又は必要に応じた員数

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

南開通商株式会社

〒101-0032東京都千代田区岩本町2-1-19 ファーストビル
電話 (03) 5687-3644

*製造業者

エニカトレーディング社、パキスタン