


アネロイド式血圧計

ギヤフリーアネロイド血圧計

【禁忌・禁止】

本品に強い衝撃(落下等)を加えないで下さい。故障の原因になります。
ゴム球、ゴム袋は天然ゴムで出来ています。天然ゴムにアレルギー反応のある方に重篤な症状を引き起こす恐れがあります。ご使用はお控えください。

【形状・構造等】

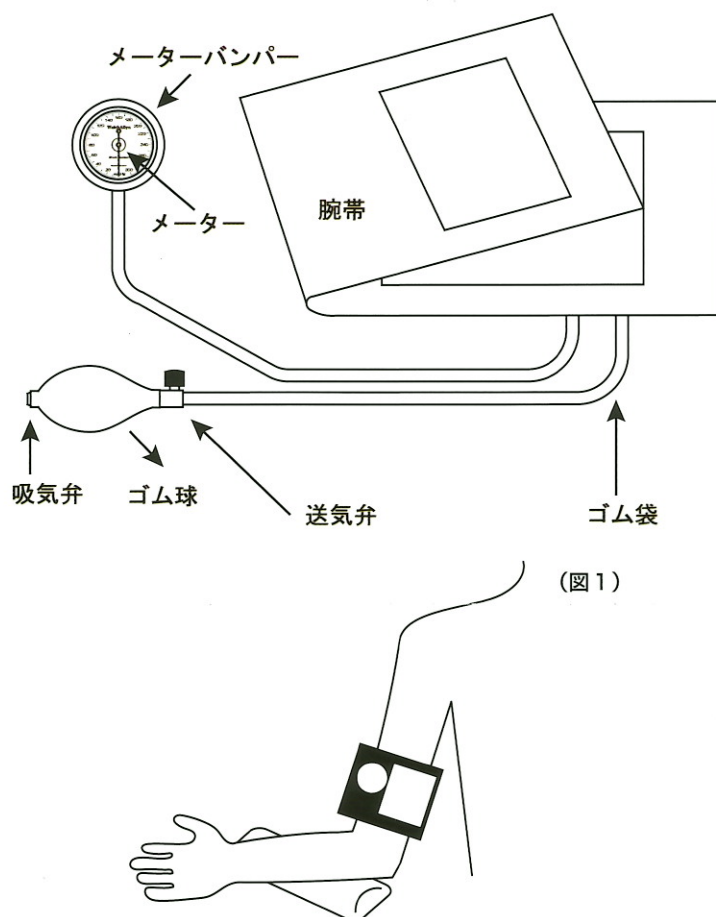

(図1)

【使用方法】

1. 上腕が心臓の高さぐらいになるように、軽く曲げて水平な台の上に置き、掌を開き上に向けます。(図1)
2. 腕帯を上腕部に巻き、ベルクロで留めます。聴診器は脈音の最もよく聞こえる位置にあてて下さい。送気弁を締め、ゴム球を圧して腕帯へ空気を送り、圧力を加えます。
3. 加圧し目盛を上げると脈拍音が聞こえ始めます。やがて、脈拍音が聞こえなくなりますが、目盛がさらに20~30mm/Hg上がるまで加圧します。
4. 次に、送気弁のネジを少しゆるめ徐々に空気を抜き、目盛を下げてゆきます。再び脈拍音が聞こえ始めた瞬間、すばやくネジを締めて目盛を読んでください。これが最高血圧値です。
5. さらに、ネジを少しずつゆるめて、脈拍音が遠くなるまで圧力を下げます。次第に脈拍音が小さくなり聞こえなくなったら、ネジを締めて目盛を読んでください。これが最低血圧値です。

【使用上の注意】

1. 使用前に、メーターの針が正確に0mm/Hg(又は±3mm/Hg)を指していることを確認してください。
2. 血流を制限し、危害をもたらす恐れがありますので、必要以上に長い間、膨らんだ腕帯を上腕部に巻き続けたままにしないでください。
3. 大人以外の小さい子供及び幼児・乳児の血圧を測定する場合、何らかの起きるかもしれないトラブルを避けるため、事前に医師に相談してください。
4. 使用しないときは、腕帯から完全に空気を抜いてから保管してください。
5. 精密機器のため、落下・衝撃等の乱暴な取り扱いはいししないでください。
6. 高温、多湿、直射日光は避けて保管してください。
7. ラテックス製部品(ゴム袋、ゴム球)はアレルギーのある方には非常に危険な症状を引き起こすことがあります。決してご使用にならないでください。

【有効期間・使用の期限】

標準的な使用期間の目安: 3年 【自己認証による】

【包装】

包装単位 1台

【製造販売業者】

製造販売業者名 株式会社 三 恵
住 所 千葉県市原市八幡海岸通1969-33, 34
電 話 番 号 0436-41-1820
F A X 0436-41-1845

メーター	直径54mm 約60g(ウェルチアレン製DS44A)
銘板	20~300mmHg(20mmHg毎に数値表示)
腕帯	成人用 14×54cm ナイロン製または綿(マジックテープ:ポリエステル製) 上腕巻き付け範囲サイズ24~40cm
	小児用 11×34cm ナイロン製(マジックテープ:ポリエステル製) 上腕巻き付け範囲サイズ18~28cm
ゴム袋	成人用 12×23cm ラテックス製
	小児用 9×18cm ラテックス製
ゴム球	ラテックス製
送気弁、吸気弁	真鍮クロームメッキ 2~3mmHg/秒の減圧が可能
メーターバンパー	合成ゴム φ60mm 厚さ14mm

【使用目的】

本品は、腕周りに巻きつける加圧可能なカフ、カフ内の空気圧を調整する弁、アネロイド式圧力計から構成されている。

【品目仕様等】

メーターの精度は、誤差±3mmHg以内である。
又、JIS T 4203-1990に該当する。