

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 短期的使用口腔咽頭エアウェイ JMDN コード：70259000

再使用禁止

バーマンエアウェイ

【警告】

〈使用方法〉

- ・使用前に滅菌して下さい。
- ・使用中は閉塞を起こさないように常に観察して下さい。

【禁忌・禁止】

〈使用方法〉

- ・使用目的以外に使用しないで下さい。
- ・全ての操作において、定められた操作・使用方法以外の操作をしないで下さい。
- ・再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】



1. 寸法

規格	幅×全長	色
40mm	11×40mm	ピンク
50mm	12×50mm	ブルー
60mm	13×60mm	ブラック
70mm (小)	15×70mm	ホワイト
80mm (中)	17×80mm	ホワイト・グリーン
90mm (大)	20×90mm	ホワイト・イエロー
100mm	21×100mm	レッド
110mm	22×110mm	オレンジ

2. 原材料

ポリエチレン

【使用目的又は効果】

本製品は、短期的使用を目的として、ガス交換又は吸引時に気道開存性を維持するために、口腔のみ挿入して使用する。また、舌による気流遮断の防止に有用な器具である。

【使用方法等】

- (1) 使用前にEOG滅菌をする。
- (2) 患者に対して適切なサイズを選択する。
- (3) 親指と人差し指を交差させて、親指を上の上の歯に当て、患者の口を開ける。
- (4) 挿入する際に患者の舌根部が押し込まれないことを確認する。
- (5) 本製品の先端を口から口蓋側に向け、挿入する。半分ほど挿入した段階で、本製品を180°逆転させ、つばの部分患者の唇或いは歯に接するまで、挿入してください。
(舌圧子で舌を押さえる場合、本製品を咽頭湾曲位置まで挿入することができる。)
- (6) 咽頭反射又は嘔吐反射を誘発する恐れがあるので、注意する事。

【使用上の注意】

- (1) 使用目的以外に使用しないで下さい。
- (2) 定められた操作・使用方法以外の使用をしないで下さい。
- (3) 故障または異常が発生したときは使用を中止し、速やかに適切かつ安全な処置を採って下さい。
- (4) 単回使用のため再使用をしないで下さい。

【保管方法及び有効期間等】

高温、多湿、直射日光を避け、常温、常圧、水のかからない場所で適切に保管をして下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

松吉医科器械株式会社

住所：〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9

電話：03-5816-8819

製造業者

ASIA CONNECTION CO.,LTD. (台湾)