

機械器具 50 開創又は開孔用器具
一般医療機器 開孔器 JMDN コード：35517000

再使用禁止


開口器（エスマル氏）

【禁忌・禁止】

〈使用方法〉

- ・使用目的以外に使用しないで下さい。
- ・すべての操作において、定められた操作・使用方法以外の操作をしないで下さい。
- ・再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

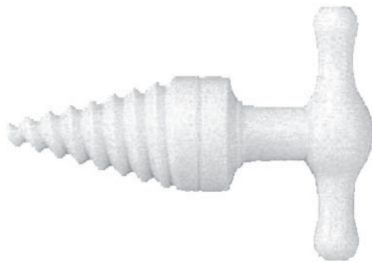

1. 寸法
全長85mm
2. 原材料
ポリカーボネート
3. 原理
本製品はネジのような円錐形状をした先端で硬度に富んでおり、開孔する部位に挿入させ、ハンドルをねじ込む事によって隙間を拡大させる。

【使用目的又は効果】

本製品は、遠位端は丸く、挿入して開孔するときに内腔、身体開口部又は管を拡張することができる、検査又は他の器具の挿入時に用いる器具である。

【使用方法等】

- (1) 使用前に洗浄・消毒、必要に応じて滅菌する（EOG滅菌可能）。
- (2) 先端を上、下歯の隙間に挿入する。
- (3) ハンドルを徐々にねじ込むことにより、上、下歯の隙間が拡大する。

【使用上の注意】

- (1) 使用目的以外に使用しないで下さい。
- (2) 定められた操作・使用方法以外の使用をしないで下さい。
- (3) 故障または異常が発生したときは使用を中止し、速やかに適切かつ安全な処置を行って下さい。
- (4) 単回使用のため再使用をしないで下さい。

【保管方法及び有効期間等】

高温、多湿、直射日光を避け、常温、常圧、水のかからない場所で適切に保管をして下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

松吉医科器械株式会社

住所：〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9

電話：03-5816-8819

製造業者

ASIA CONNECTION CO.,LTD. (台湾)