

機械器具 50 開創又は開孔用器具
一般医療機器 開孔器 JMDN コード：35517000

再使用禁止

ディスポーザブル鼻鏡

【禁忌・禁止】

〈使用方法〉

- ・使用目的以外に使用しないで下さい。
- ・すべての操作において、定められた操作・使用方法以外の操作をしないで下さい。
- ・再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】



1. 寸法
先端幅6mm×先端の長さ25mm×全長145mm
2. 原材料
ABS樹脂
3. 原理
開孔部位に挿入させ、ハンドルに力を加えることにより、先端部分が開く。身体の開口部を拡大させる。

【使用目的又は効果】

挿入して開孔するときに内腔又は身体開口部を拡張又は伸張することができる。

【使用方法等】

- (1) 使用前に洗浄・消毒、必要に応じて滅菌する（EOG滅菌可能）。
- (2) 本製品は身体の開孔部位に先端を挿入させ、ハンドルに力を加えて、目的部位を拡大させる。

【使用上の注意】

- (1) 使用目的以外に使用しないで下さい。
- (2) 本品を加工・改造しないで下さい。
- (3) 定められた操作・使用方法以外の使用をしないで下さい。
- (4) 故障または異常が発生したときは使用を中止し、速やかに適切かつ安全な処置を行って下さい。

【保管方法及び有効期間等】

高温、多湿、直射日光を避け、常温、常圧、水のかからない場所で適切に保管をして下さい。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者

松吉医科器械株式会社

住所：〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9

電話：03-5816-8819

製造業者

ASIA CONNECTION CO.,LTD. (台湾)