

類別 : 機械器具 76 医療用吸入器 管理医療機器

一般的名称 : 家庭用超音波吸入器 (JMDNコード 71020000)


販売名 : 超音波温熱吸入器 UN-135

【禁忌・禁止】

- 喘息などの治療中の方は、必ず医師に相談の上ご使用ください。
- 改造や修理は、修理技術者以外には行わないでください。保障の対象外になるばかりか、本製品を損傷したり火災の原因になります。
- ヒーター部は高温になっていますので、お取り扱いの際は充分ご注意ください。守らないと火傷する恐れがあります。

*【形状・構造及び原理等】

1. 各部の名前

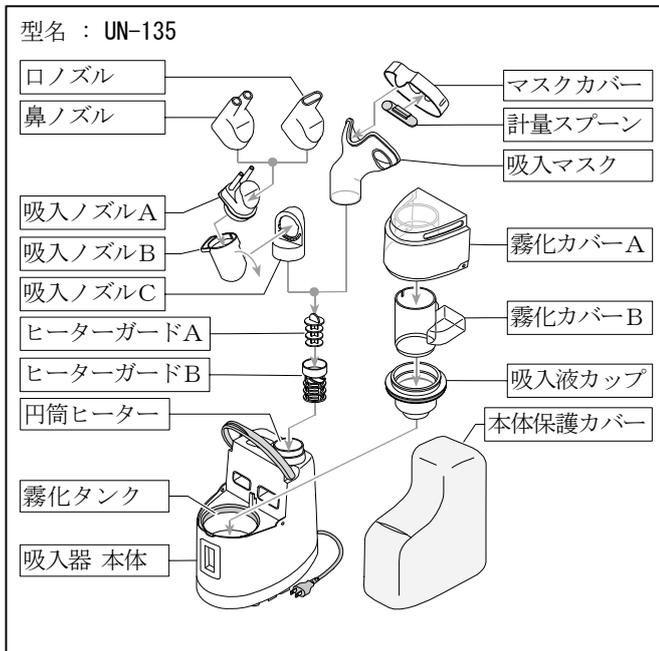

2. 標準付属品

取扱説明書	1冊
添付文書	1枚
クイックガイド	1枚

3. 外形寸法

111(幅)×286(高さ)×188(奥行き) [mm]

4. 質量

約1.1 kg

5. 電氣的定格

定格電圧	: AC100V 50/60Hz
定格電力	: 90 W
定格時間	: 短時間定格5分間
電撃保護	: クラスII B型
水浸入に対する保護	: IP21

*【作動・動作原理】

本製品は、圧電セラミックスの振動により発生させた超音波を利用し、吸入液を平均粒子径 $5\mu\text{m}$ の霧にします。この霧を送風ファンにより吸入マスクまで送ります。このとき円筒ヒーターにより霧は温められます。

*【使用目的、効能又は効果】

鼻腔と咽喉の加湿、加温による不快感の改善。一般家庭で使用すること。

【品目仕様等】

噴霧量	強	: 約 1.8 mL/分、
	普通	: 約 1.2 mL/分
噴霧粒子径		: 約 $5\mu\text{m}$

*【操作方法又は使用方法等】

製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

(1) ご使用前に

- ① ヒーターガード、吸入液カップ、霧化カバー、吸入ノズル、吸入マスク、口ノズル、鼻ノズルを水道水ですすいでください。

(2) 霧化タンクに水道水を入れます。

- ① 霧化タンクに水道水を青色の線まで入れます。

(3) 吸入液カップをセットします。

- ① 吸入液カップに水道水をピンク色の線まで入れ、霧化タンクにセットします。
- ② 約1%の食塩水を使用する場合、付属の計量スプーンですり切り一杯の食塩(0.32g)を吸入液カップに入れます。

(4) 本体を用意します。

- ① 噴出口にヒーターガード、吸入マスクまたは、ノズルを取り付けます。
- ② 電源プラグをコンセントにしっかり差し込みます。

(5) 吸入を始めます。

- ① 電源スイッチを押し、予熱の15秒間待ちます。
- ② 口・鼻を吸入マスクまたは、ノズルに近づけます。
- ③ 霧化量スイッチを押して噴霧量を選択します。

(6) 使い終わったら

- ① コンセントから電源プラグを抜きます。
- ② 霧化タンクの水、吸入液カップに残っている吸入液を捨てます。

取扱説明書を必ずご参照ください。

- ③ 本体が十分に冷えたら、吸入マスクまたは、ノズル、ヒーターガードを外し、吸入マスクまたは、ノズル、ヒーターガード、吸入液カップ、霧化カバーを水洗いして、本体に付いた水滴をよく乾いた布で拭き取ります。

*【使用上の注意】

- 吸入液には常にあたらしい水道水、または1%の食塩水を使用してください。守らないとカビや雑菌が繁殖し、健康を害する恐れがあります。
- 薬液は使用しないでください。守らないと、故障や健康を害する原因になります。
- 時間の経った古い水は使用しないでください。守らないと、故障や健康を害する原因になります。
- 吸入液の量は、入れすぎたり、少なすぎたりしないでください。あふれたり、霧の出が悪くなる原因になります。
- 吸入液および霧化タンクの水道水にお湯を使用しないでください。守らないと故障の原因になります。
- 吸入液カップ底部の振動膜をつぶしたり傷つけたりしないでください。守らないと霧の量が減ったり霧が出なくなることがあります。
- 吸入以外でのご使用は、絶対おやめください。守らないと故障や感電する恐れがあります。
- 約1%の食塩水を作るときは、食塩の分量を間違えないでください。守らないと効力が失われるばかりではなく、健康を害する原因になります。
- 約1%の食塩水は、必ず水道水で作ってください。守らないと、効力が失われるばかりでなく、健康を害する原因になります。
- コンタクトレンズ用の食塩水は使用しないでください。守らないと、故障や健康を害する原因になります。
- 寒冷地などで、吸入液、霧化タンクに入れる水道水が冷たい場合は、室温になじませるため、しばらく放置してから使用してください。守らないと、霧化量が減少する原因になります。
- 霧化タンクには絶対に食塩を入れないでください。守らないと故障の原因になります。
- 霧化タンクの底部（白色の部分）を押したり傷つけたりしないでください。守らないと、故障の原因になります。
- 吸入は1回5分以内とし、続けて使用する場合は2回までとしてください。それ以上の使用は、低温火傷をする恐れがあります。
- 口、鼻が熱いと感じられたら、吸入マスクまたは、ノズルから口、鼻を離して吸入してください。低温火傷をする恐れがあります。
- ヒーターガードを必ず装着してください。守らないと、霧が温まらなくなります。また、ヒーターが露出して火傷や火災の原因になります。
- 極端に高温になったり、焦げ臭い匂いがしたり、動かなくなった場合は、コンセントから電源プラグを抜き、速やかに使用を中止してください。守らないと故障・感電・火災の恐れがあります。
- 停電のときは速やかに使用を中止して電源プラグをコンセントから抜いてください。守らないと故障や感電する恐れがあります。
- 濡れた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししないでください。守らないと故障や感電する恐れがあります。
- 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持って引き抜くなどしてコードの接続部に無理な力をかけないでください。守らないと故障や感電する恐れがあります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい場合は使用しないでください。守らないと感電や火災の原因になります。
- 電源コードの上に重いものを乗せたり、挟み込んだりしないでください。守らないと感電や火災の原因になります。
- 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。守らないと感電や火災の原因になります。
- 使用後はコンセントから電源プラグを抜いて、ヒーターが冷めてから保管してください。火傷や火災の原因になります。
- 使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。守らないと、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。
- しばらく使用しても効果が表れない場合には、医師又は専門家にご相談ください。守らないと体調不良をおこす恐れがあります。
- 身体に異常（例えば、鼻粘膜の炎症や口腔内の炎症）がある場合は、必ず医師に相談の上ご使用ください。守らないと体調不良をおこす恐れがあります。
- 使用中に身体に異常を感じたときは、速やかに使用を中止してください。守らないと体調不良をおこす恐れがあります。
- 事故を防ぐため、お子様や身体の不自由な人が本製品を使用する場合は、必ず助けとなる人が付き添ってください。守らないと怪我・火傷・事故・故障や感電する恐れがあります。
- 傾斜、振動、衝撃などのない場所でご使用ください。守らないと故障する恐れがあります。
- 使用中に本体を揺らしたり、傾けたりしないでください。守らないと故障や感電する恐れがあります。
- 使用中に吸入器本体が転倒した場合は、使用を中止して電源プラグを抜いてください。守らないと、感電の原因になります。
- 強い電磁波を発生する機器を近づけないでください。守らないと誤動作する恐れがあります。
- 直射日光が長時間あたる場所では使用しないでください。守らないと故障や感電する恐れがあります。
- ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気のない場所でご使用ください。守らないと故障や感電する恐れがあります。
- AC100V以外の電源では使用しないでください。守らないと故障や誤作動・火災の原因になります。
- 霧化カバーAを必ず装着してください。守らないと、吸入液が周囲に飛散します。
- 他の医療機器や器具と接続しないでください。守らないと事故の恐れがあります。
- お手入れのときは、使用後15分以上放置し、ヒーターが完全に冷めたことを確認してください。守らないと、火傷の原因になります。
- 本体を水で丸洗いしないでください。守らないと故障や感電する恐れがあります。
- 熱湯で煮沸消毒しないでください。守らないと、故障・変形・変色の原因になります。
- ベンジン、シンナーなどで吸入器を清掃しないでください。守らないと、故障・変形・変色の原因になります。

- 使用後は、必ず吸入液カップ、霧化タンク内に残った水を捨て、水滴を拭き取ってください。守らないと、故障や健康を害する原因になります。
- 使用後は本製品を清掃し、乾燥させてから保管してください。守らないと故障する恐れがあります。
- しばらく使用しなかった場合は、よく清掃してから使用してください。守らないと、カビや雑菌が繁殖し、健康を害する原因になります。
- しばらく使用しなかった本製品を使用するときは、本製品が正常に、かつ安全に作動することを確認してください。守らないと故障や感電する恐れがあります。
- 保管する際は、本製品をお子様の手の届かないところに保管してください。守らないとお子様は怪我する恐れがあります。

*【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

【保管方法】

- 水のかからない場所。直射日光があたらない場所。
- ほこり、塩分、イオウ、化学薬品等を含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所。
- 傾斜、振動、衝撃等のない安定した場所。

【有効期間・使用期限】

- 正規の保守点検を行った場合…………… 5年間

【保守・点検に係わる事項】

【注意事項】

- しばらく使用しなかったときには、使用前に必ず正常にかつ安全に作動すること（電源が入る、霧化するなど）を確認してからご使用ください。
- 本装置の分解、及び改造はしないでください。
- 本体は清掃時も含めて絶対に水につけないでください。
- 汚れていたり濡れていないかを確認してください。
- 汚れはぬるま湯か石けん水を含ませた布で拭いてください。
- シンナー、ベンジンなどの溶剤を用いて清掃しないでください。

【包装】

1台／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

名称 : 株式会社エー・アンド・デイ
 住所 : 〒364-8585 埼玉県北本市朝日 1-243
 電話 : 0120-514-016

製造業者

名称 : 愛安德電子(深圳)有限公司
 A&D ELECTRONICS (SHEN ZHEN) CO., LTD.
 中華人民共和国