

機械器具 25 医療用鏡

JMDN コード: 70176000 自然開口向け内視鏡用くもり止め

一般医療機器


デフォッガー 内視鏡用くもり止め

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は内視鏡の結露防止の無色透明な溶液及びスポンジ (5cmx4. 5cm) で構成されている。

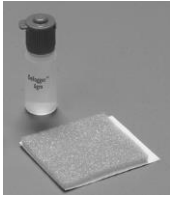

成分: 水/イソプロピルアルコール/界面活性剤 (ナトリウムジオクチル)

【使用目的】

自然開口部より挿入される内視鏡のレンズ面上に塗布して使用する。
内視鏡と体内温度差により発生する結露を防止する。

【品目仕様等】

結露による視界不良を低減する。

【使用方法】

1. スポンジのシールを剥がし、ドレープ上に貼付する。
2. キャップを開け、溶液を 5～6 滴スポンジに滴下する。
3. 内視鏡のレンズ面にスポンジをこすりつけ本品を塗布する。
4. 必要に応じて繰り返す。

【使用上の注意】

＜使用注意＞

- ・使用に関しては無菌的に取り扱い、すべての操作は汚染防止に配慮した上で行うこと。
- ・包装から取り出す際、容器の横転に注意すること。
- ・スポンジは水平な面に固定すること。
- ・スポンジ上にレンズ面を当てる際は必要以上に強く押し付けないこと。

＜重要な基本的注意＞

- ・包装を開封したらすぐ使用し、開封した場合は未使用であっても廃棄すること。
- ・本品がこぼれて目や皮膚に触れた場合は、直ちに清潔な水で洗浄すること。万一異常を感じたら速やかに医師の診察を受けること。

【貯蔵・保管方法】

1. 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて室温で保管すること。
2. 使用期限は包装に記載。

【包装】

20 パック(箱)

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売者:

株式会社 フジメディカル

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F

TEL: 03-3356-8377

外国製造業者:

デロイヤル インターコンチネンタル社

DeRoyal Intercontinental, S.R.L.

ドミニカ共和国

