

機械器具(21) 類別名称 内臓機能検査用器具
管理医療機器

一般的名称: 一酸化炭素ガス分析装置 JMDN コード: 35467000

「piCO スモーカーライザー」の構成品
D ピース

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

1. アルコールもしくはその他の有機溶剤を含む洗浄・消毒剤は、使用しないこと。また、アルコール消毒した手で操作しないこと。
[本体内部のセンサーを損傷させ、測定が出来なくなる恐れがあるため]
2. 清拭の場合は、アルコールフリーのワイパーか消毒液を含まないガーゼ等を使用すること。[本体内部のセンサーを損傷させ、測定が出来なくなる恐れがあるため]
3. アルコール消毒や滅菌をしないこと。
4. 液体に浸したり、液体をかけたりしないこと。
5. 測定後は必ず本体から本品を外し、センサーからガスを抜いた状態で本体を保管すること。[本体からガスが抜けず、正しく測定できない恐れがあるため。]

* 【保守・点検に係る事項】

＜使用者により保守点検事項＞

1. 本品は、毎月、または汚れが生じた段階で交換すること。また感染の疑いのある患者に使用した場合には廃棄し、新しいものに交換すること。
2. 使用後に本品を消毒、または滅菌しないこと。清拭を行う場合は、アルコールフリーのワイパーか消毒液を含まないガーゼ等を使用すること。

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 原田産業株式会社

電話番号: 06-6244-0978

外国製造業者: ベッドフォントサイエンティフィック社
(Bedfont Scientific Ltd.)

国名: 英国

* 【形状・構造及び原理等】

1. 構成

D ピース

2. 適用機種

本品は、以下の一酸化炭素ガス分析装置の構成品である。

販売名		医療機器承認番号
(1)	ピコ プラス スモーカーライザー	22200BZX00121000
(2)	piCO スモーカーライザー	23000BZX00308000

3. 形状

D ピース



4. 各部の機能及び名称

番号	名称	機能及び動作
①	マウスピース挿入部	マウスピースを差し込む。
②	本体挿入部	本体の「D ピース挿入部」に差し込む。

5. 作動原理

接続する機器の付属文書を参照すること。

【使用目的又は効果】

接続する機器の付属文書を参照すること。

【使用方法等】

接続する機器の付属文書を参照すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

1. 高温、多湿、直射日光、水濡れを避け、ほこり、アルコール、塩分又は硫黄分を含んだ空気等により、悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
2. 化学薬品の保管場所やガスを発生する場所に保管しないこと。

＜耐用期間＞

本品は、1 か月を目途に交換すること。汚れが目立つ時は 1 か月以内であっても交換すること。また、感染の疑いのある患者に使用した場合には廃棄し、新しいものに交換すること。[自己認証(当社データ)による]