

小児用クリッププローブ


【禁忌・禁止】

使用方法

- ・磁気共鳴画像診断装置（MRI装置）の近くで使用しないこと。[MRI装置への吸着、過熱、火傷等のおそれがあるため。]
- ・本品を装着したままX線撮影を行わないこと。[過熱、火傷等のおそれがあるため。]
- ・可燃性麻酔ガス、および高濃度酸素雰囲気内では使用しないこと。[爆発または火災を引き起こすおそれがあるため。]
- ・同じ部位に2時間以上装着しないこと。装着部位に異常が見られた場合は装着する部位を替えること。[長時間の連続使用により、特に微小循環不良の患者に不快感や痛みが現れるおそれがあるため。]
- ・浮腫のない無傷のきれいな皮膚（例えば開放創、病変、感染または炎症を起こした領域以外の部位）にのみ装着すること。[症状の悪化や感染症のおそれがあるため。]
- ・本品の装着部を見つめないこと。[放射される赤色光、赤外線により目を損傷するおそれがあるため。]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

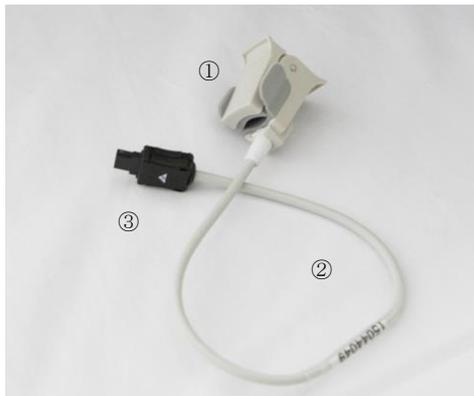

- ① クリッププローブ
② ケーブル
③ コネクタ

2. 寸法・重量

- ・ケーブル長寸法：250mm 許容誤差：±10mm

3. 動作原理

小児の手指にクリップして使用し、皮膚を通して光を照射し、動脈組織血中のオキシヘモグロビン及びデオキシヘモグロビンによって吸収される光量を検知する。


親機（一般的名称：パルスオキシメータ、販売名：フィンガーパルスオキシメータ PC-60E）で信号が受信され、結果が表示される。

【使用目的又は効果】


本品は、動脈血の経皮的酸素飽和度及び脈拍数を測定し、表示するために使用する。親機で信号が受信され、結果が表示される。

【使用方法等】

1. プローブのコネクタを、特定されたパルスオキシメータに、コネクタの向きに注意して接続する。外部プローブを接続すると内蔵プローブは無効になる。

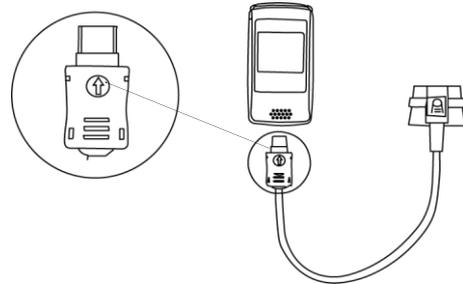

2. プローブのクリップを開き、ゴムクッションの内側に指を入れる。

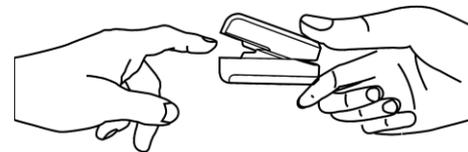

3. 指が正しい位置にあることを確認して、指をクリップする。
4. 自動的にパルスオキシメータの電源が入り、測定が開始される。
5. 指を本品から抜くと、自動的にパルスオキシメータの電源が切れる。

併用可能な医療機器

一般的名称：パルスオキシメータ

| 販売名 | 医療機器認証番号 |
|-----------------------|------------------|
| フィンガーパルスオキシメータ PC-60E | 229ALBZX00025000 |

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 1) 周囲温度が37℃を超える状況で本品を連続使用する場合、センサーの過熱により火傷をする可能性があるため、十分に注意すること。
- 2) 本品が濡れた場合は、直ちに使用を中止して乾燥させ、正常な動作が確認されるまで使用しないこと。
- 3) 本品を寒い場所から暖かく湿気の多い場所に持ち込んだ場合は、直ぐには使用せず、本品が周囲の温度に達するまで15分以上放置すること。
- 4) 高温や高压蒸気による消毒をしないこと。清掃方法については「保守・点検に係る事項」の項を参照すること。
- 5) 正確に測定するため、センサーに指を正しく挿入すること。
- 6) 測定中に指を振らないこと。
- 7) 濡れた指をセンサーに挿入しないこと。
- 8) 静脈内注射や非観血式血圧測定用のカフが巻かれている手の指に装着しないこと。
- 9) センサーから放射される光を遮ってしまうため、マニキュアや付け爪が施されている指に装着しないこと。
- 10) ネイルポリッシュは、測定精度に影響を及ぼすことがある。また、爪が長過ぎる場合には測定ができないことや不正確になるおそれがある。

取扱説明書を必ずご参照ください。

- 11) 激しい運動や電気手術器による干渉は、測定精度に影響を及ぼすことがある。
- 12) 蛍光灯、レーザー光、赤外線ヒーター、直射日光などの高強度光源の下では、正しく測定できない場合がある。この場合にはセンサーに不透明なカバーをかけるか、必要に応じて測定場所を変更すること。
- 13) 最初の読み取り値が不十分な波形(不規則でも滑らかでもない)で表示されても、しばらく待つことにより安定した波形が表示されることが予想される。いつまでも安定した波形が表示されない場合には再起動すること。
- 14) バッテリーインジケータが消灯したらバッテリーを交換すること。
- 15) 本品を 7 日以上使用しない場合は、バッテリーからの液漏れ、患者あるいは使用者の軽度な火傷を防ぐため、バッテリーを取り外すこと。
- 16) 次の条件を満たしている環境下で使用すること。
温度：5°C~40°C
相対湿度：30~80%（結露しないこと）
大気圧：700hPa~1060hPa

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- 1) 水濡れに注意し、高温・多湿・直射日光を避け保管すること。
- 2) 振動、塵埃、腐食性ガスなどの多い場所や、化学薬品によるガスの発生する場所に保管しないこと。

<耐用期間>

5年「自己認証(自社データによる)」

【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検>

- 1) 外装が汚れている場合、水（中性洗剤を混ぜたものも可）または 70%イソプロパノールを含ませた柔らかい布で外装を清掃すること。清掃後は余分な水分を乾いた柔らかい布で拭きとること。
- 2) 高圧蒸気滅菌、エチレンオキシド滅菌等をしないこと。
- 3) 本品内部に使用者による保守が可能な部品はないので、本品を無理に開けたり、修理等を試みたりしないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：カフベンテックジャパン株式会社

住所：東京都文京区本郷 3-42-5

電話番号：TEL 03-3814-1133

営業窓口：TEL 03-5805-5835

外国製造業者：Shenzhen Creative Industry Co., Ltd.

製造国名：中華人民共和国