

医療用品 05 副木
一般医療機器 手・指用副木 JMDN コード：16210000
販売名 まきづめリフト

【禁忌・禁止】

以下の症状、疾患を有する方。

- ・ 本品の原材料に過敏症又はアレルギーのある方。
- ・ 重篤な糖尿病や重度の血行障害のある方。
- ・ 使用する爪に感染症の症状がある方。
- ・ 変形した製品は再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】


＜素材＞

ワイヤー：形状記憶合金（チタン・ニッケル合金）

被覆樹脂：フッ素樹脂

クリップ：SUS304 ステンレスバネ合金

* ＜形状・構造＞

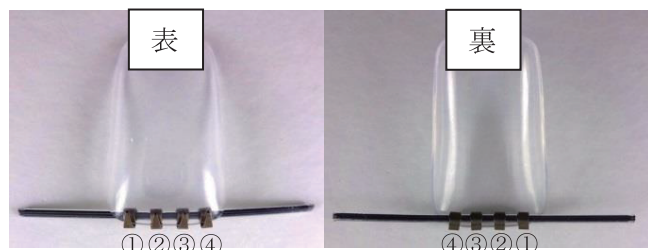

※小さい爪の場合は、クリップの数を減らして使用する。

* ＜形状記憶合金製ワイヤーの寸法＞

項目	寸法
長さ	25 ～ 45mm
太さ	Φ3.0 ～ 4.5mm

* ＜原理＞

本品は、クリップ部分を爪の先端部に装着して固定し、樹脂で被覆された 2 本の形状記憶合金ワイヤーを爪の裏側に配置し、その復元力により巻爪や変形爪の形状を矯正することによって、痛みの軽減や改善を行うために用いる金属製の器具である。なお、爪の幅に応じて、ワイヤーは切断する。

** 【使用目的又は効果】

本品は、巻爪や変形爪を矯正して装着直後から形状の改善や痛みの軽減を得ることを目的に使用する器具である。

【使用方法】

1. 爪が本品を装着できるだけの長さ(2.5mm～3.0mm)に伸びていることを確認した後、装着したい周辺部を清潔にし、十分に乾燥させる。
- * 2. 爪幅に合わせてクリップを動かし、爪端から順にしっかり最後まで押し込む。
3. 爪が厚くてかかりにくい場合はヤスリで爪の厚さを1mm程度に調整する。
4. 爪端にワイヤーがかかっていることを確認したうえで、ニッパーを爪裏に挿し込むようにして爪から飛び出したワイヤーを爪端よりも少し内側で切断する。

※ なお、爪端からはみださない長さにワイヤーを切断したうえで装着してもよい。

【使用上の注意】

- ・ 爪が厚い場合は、爪をやすりなどで薄く削り使用すること。
- ・ 爪が短くクリップがかけられない場合は、爪が伸びてから使用すること。
- ・ 巻爪や変形爪が改善した場合でも、使用を中止すると爪が元の形に戻る場合がある。
- ・ 本品で靴下やストッキングを破る可能性があるので注意すること。
- ・ 本品の使用中に、傷み・刺激・違和感・かぶれなどの異常がある場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。
- ・ クリップや被覆樹脂が変形した場合は効果が発揮できないので再使用しないこと。
- ・ 切断したワイヤーは適切に処分する。

【保管方法及び有効期間】

室温で清潔な場所で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

滅菌が必要になった場合、施設で定める適切な滅菌条件に従い、高圧蒸気滅菌又はエチレンオキサイドガス滅菌を行ったうえで使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：JPS 株式会社

電話番号：03-5992-0760