

ロビンソンカテーテルA

再使用禁止

【警告】

1. 本品は滅菌済ディスポーザブル製品なので再使用はしないこと。
2. スタイレットを用いて挿入する際は、スタイレットがカテーテルの先端まで達していることを確認した後、カテーテルやスタイレットを引き戻さずに挿入すること。
[スタイレットが側孔から飛び出し、尿道粘膜を損傷する危険性がある。]
3. 本品を抜去後、出血等があった場合は、直ちに医師の指示に従い、適切な処置を施すこと。

【禁忌・禁止】

・使用方法

シャフト部分を鉗子等で挟まないこと。また、刃物等による傷は絶対に避けること。[カテーテル切断の危険性がある。]

・適用対象

*過去に「天然ゴム」に対してアナフィラキシーの既往歴のある患者


【併用禁忌】

1. オリーブ油、白色ワセリン等の動物性油脂、植物性油脂、鉱物性油脂を含んだ潤滑剤、造影剤もしくは薬剤（軟膏剤等）を絶対に使用しないこと。


【形状・構造及び原理等】

材質：天然ゴムラテックス


ロビンソンタイプ

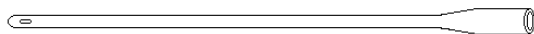

ホールインチップ（3ツ穴）タイプ

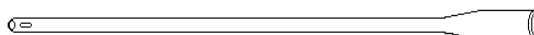

アンダーソンタイプ

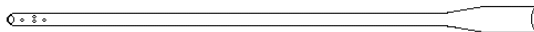

ロビンソンタイプ短型



外径寸法

記号	外径	記号	外径
3EG (6Fr)	2.5mm	10EG (18Fr)	6.0mm
4EG (8Fr)	3.0mm	11EG (20Fr)	6.5mm
5EG (10Fr)	3.5mm	12EG (22Fr)	7.0mm
6EG (12Fr)	4.0mm	13EG (22Fr)	7.5mm
7EG (14Fr)	4.5mm	14EG (24Fr)	8.0mm
8EG (16Fr)	5.0mm	15EG (26Fr)	8.5mm
9EG (18Fr)	5.5mm		

**【使用目的、又は効果】

導尿用

滅菌済みであるので、そのまま直ちに使用できる。

**【使用方法等】

1. 包装を開封したら、汚染に十分注意して、カテーテルのシャフトに潤滑剤を塗布する。
2. カテーテルに尿バッグを接続し、尿道口よりカテーテルを挿入し、先端開口部が膀胱内に達した後、尿の流出を確認する。
3. カテーテルを抜去する際は、異常な抵抗がないことを確認しながら、ゆっくりとカテーテルを引き抜く。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- ・天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師による適切な措置を施してください。

2. 重要な基本的注意

- ・使用目的以外には使用しないこと。
- ・本品は医家向け製品である。
- ・カテーテル挿入時、異常な抵抗を感じたときは、無理に挿入操作を行わず、カテーテルを抜去し、挿入できなかった原因を確認すること。
- ・包装が破損・汚損している場合や製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。また、再滅菌しないこと。
- ・包装を開封したら、すぐに使用し、使用後は医療廃棄物として適切に処分すること。
- ・体動等でねじれたり折れ曲がったりしてカテーテルが閉塞する危険性があるので、カテーテルの固定方法に注意し使用すること。

**【保管方法及び有効期間】

**1. 保管方法

直射日光を避け、乾燥した涼しい場所で室温にて保管してください。

**2. 有効期間

使用の期限：直接の包装及び外箱に記載。
「自己認証（当社データ）による」

【包装】

ロビンソンタイプ

12本入り又は50本入り／1箱

ホールインチップタイプ

12本入り／1箱

アンダーソンタイプ

25本入り／1箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**製造販売業者：澤谷ゴム株式会社
電話番号：0858-85-5656

**製造業者：澤谷ゴム株式会社