

機械器具 06 呼吸補助器
管理医療機器 空気・酸素マスク JMDN コード：35171000


再使用禁止

酸素マスク（スイベルコネクタ）

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、ポリ塩化ビニル（可塑剤：DEHT/DINCH）を使用しています。

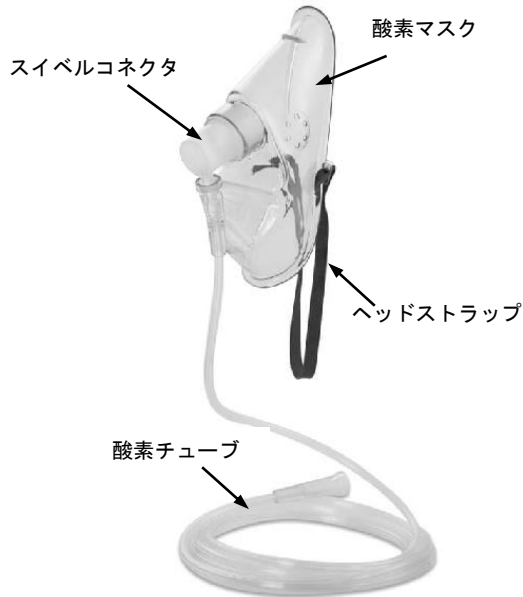

2. 使用中はマスクとの接続部によじれやキンク等の閉塞がないことを絶えず確認してください。

また、推奨流量が投与されていること、本品と酸素供給源との接続が確実であることを確認してください。

3. 気管内チューブまたは気管切開チューブと接続して使用しないで下さい。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて室温で保管してください。

＜使用期間＞

製品の外箱の使用期限欄を参照してください。[自己認証（自社データ）による]

【主要文献及び文献請求先】

株式会社 フジメディカル
TEL 03-3356-8377

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社 フジメディカル
〒160-0004
東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F
TEL 03-3356-8377



外国製造業者：

Flexicare Medical Ltd.
UK



商品番号	商品名	仕様	包装
032-10-002	酸素マスク (スイベルコネクタ)	成人用/ 酸素チューブ 2.1m 付	50 個/箱
032-10-009J	酸素マスク (スイベルコネクタ)	小児用/ 酸素チューブ 2.1m 付	20 個/箱

推奨酸素流量（ O_2 濃度）（%）

6-8 l/min 40%~50%

【使用目的又は効果】

気道に酸素ガス等を供給するために用いる。

【使用方法等】

1. 酸素供給器にチューブを接続します。
2. 酸素流量を医師の処方に基づいて設定します。酸素の流れを確認してください。
3. 患者の口と鼻を覆うようにマスクを顔にあててください。
4. マスクのストラップを患者の頭（耳掛けストラップは耳）にかけてください。
5. 紐の両端を引っ張りながらマスクの位置を固定します。
6. （ノーズクリップが付属している場合）はノーズクリップを調節して、患者の顔面にマスクが合うように整えます。
7. 必要に応じて、マスクのスイベルコネクタ部の角度を変えてください。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 使用する前に漏れや閉塞がないことを確認してください。