

機械器具 41 医療用のみ
一般医療機器 のみ 10824000

フェザー耳科用骨ノミ

【警告】

- 刃部は非常に鋭利であるため、取り扱いに注意すること。
[穿刺等のおそれがある。]

【禁忌・禁止】

- 再研磨禁止。[性能を低下させるおそれがある。]

【形状・構造及び原理等】

形状

FC-A



FC-B



組成: 刃部/ステンレス鋼
ハンドル/PBT樹脂

【使用目的又は効果】

本品は、骨や軟骨などの硬組織の切断又は輪郭研削に用いる。

【使用方法等】

ハンドルを持ち、刃部で骨組織の切断又は輪郭研削に使用する。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- 本品は、未滅菌製品であるため使用前に必ず洗浄、滅菌を行うこと。
【保守・点検に係る事項】参照。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 繰り返しの使用は性能を低下させる恐れがあるため、新しいものを使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温・多湿、直射日光を避けて室温で保管すること。
- 製造年月日はロットナンバーにより明示。

LOT 00 00 0000

製造年西暦下2桁 製造月 製造バッチ

【保守・点検に係る事項】

■洗浄方法

- 蒸留水あるいは滅菌水で洗い流してください。
- 病院の指定する洗剤の使用 방법에従い汚れを入念に洗浄してください。
- 洗浄後は、直ちに蒸留水あるいは滅菌水で洗浄液を入念にすすいでください。
- 洗浄水を拭き取り、完全に乾燥させてください。
- 損傷の無い事を確認してください。
- 消毒液による消毒が可能です。容量、用法については、各消毒液取扱説明書に従って行ってください。

■滅菌方法

- 製品を適当な滅菌バック等に入れてください。
- 適当なオーブントレイ又は、滅菌籠等に乗せてください。
- バリデート(有効性確認)された、高圧蒸気滅菌装置(摂氏135℃まで)、エチレンオキサイド滅菌装置を使用し、装置の手順又は病院における滅菌の手順に従い滅菌してください。
- 滅菌された製品は、適切な方法で使用まで保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売元＞フェザー安全剃刀株式会社 美濃工場
岐阜県美濃市松森600-1 TEL.0575-33-1855

＜製造元＞フェザー安全剃刀株式会社 本社
大阪府大阪市北区大淀南3-3-70 TEL.06-6458-1631

＜お問い合わせ先＞フェザー安全剃刀株式会社 東京支店
メディカル商品部 TEL.03-3864-0917