

機械器具50 開創又は開孔用器具
一般医療機器 硬性直達肛門鏡 JMDNコード：10156001

肛 門 鏡
プラスチック肛門鏡セット

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止（プラスチック肛門鏡）
本製品に汚れ、傷、曲がり、腐食、破損、錆等が認められた場合は、使用しないこと。
本製品を曲げ、切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）することは、故障、汚損等の原因となりますので、絶対に行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



- 構成品
- ・プラスチック肛門鏡 13本
 - ・LED肛門鏡グリップ 1本
 - ・ケース 1個

2. 原材料

構成部分名称		原材料
プラスチック肛門鏡		アクリル
LED肛門鏡グリップ	レンズ	一般市販光学用品
	スイッチ	A B S樹脂
	電池ホルダー	アルミニウム (アルマイト表面処理)
	ネジ式キャップ	黄銅(クロームメッキ表面処理)
	発光ダイオード	一般市販電気用品
	電池	

3. 動作原理

肛門鏡を肛門から挿入して肛門管および下部直腸内を拡張し、観察、診断、治療をすることができる。

【使用目的又は効果】

肛門管及び下部直腸の観察、診断、治療に用いる。照明装置を備えるものもある。

【使用方法等】

1. 未消毒のため、「肛門鏡本体」及び「マンドリン(内筒)」をグルタールアルデヒド又は逆性石けん液にて消毒後使用する。
 2. 使用前に【保守・点検に係る事項】を参照して点検を行う。
 3. 肛門鏡本体にマンドリンを装着し、肛門鏡グリップ（別売）を装着し固定する。
 4. 肛門に対して、マンドリン先端より挿入し、挿入し終わった後、マンドリンを抜去する。
 5. 肛門鏡グリップのライトをつけ診断部の状態をみる。
- ※ LED肛門鏡グリップについては、薬液をガーゼ等に浸し、汚れを拭き取ること。水又は薬液に直接浸けると故障の原因となるので止めること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・本品の取り扱いに習熟した医師が使用すること。
- ・使用前に必ず洗浄、消毒をすること。
- ・使用目的以外の目的で使用しないこと。また、使用時に必要以上の力（応力）を加えると、故障、曲がり、汚損等の原因となるので注意すること。
- ・プラスチック肛門鏡は再使用禁止の為、使用後は適切な方法により廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・貯蔵・保管にあたっては、洗浄・消毒をした後、腐食を防ぐために保管期間の長短に関わらず必ず乾燥させること。
- ・高温多湿、直射日光及び水濡れを避け、風通しの良い清潔な場所に保管すること。
- ・傾斜、振動、衝撃（運搬時も含む）などの安定状態に注意すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスが発生する場所には保管しないこと。

2. 耐用期間

保管環境、使用頻度によって使用期限は異なるため使用者の判断による。

【保守・点検に係る事項】

- ・プラスチック肛門鏡は、使用前に、汚れ、傷、われ等に異常がないか点検すること。
- ・LED肛門鏡グリップの電池交換は、底部のネジキャップを回して外し、単4電池（3本）を全て交換すること。
- ・LED肛門鏡グリップの使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去するために、薬液をガーゼ等に浸し、汚れを拭き取ること。その際、水又は薬液に直接浸けると故障の原因となるので止めること。
- ・LED肛門鏡グリップの汚染除去に用いる洗剤は、清浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。清浄後は、腐食防止の為に、直ちに乾燥させること。

【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者
株式会社荒川製作所
〒120-0013
東京都足立区弘道1丁目3番26号
TEL 03-5888-6855
FAX 03-5888-6880

製造業者
株式会社荒川製作所